



Ficha Técnica

Avental Descartável - GLOMED

REG. Nº.: 206
 RESPONSÁVEL TÉCNICA:
 SIMARA COLOMBI BUSCH
 COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: VESTIMENTA HOSPITALAR

NOME COMERCIAL: AVENTAL DESCARTÁVEL – GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450008



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD

Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Confeccionado em Tecido Não Tecido 100% Polipropileno. Possui elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço. Cor Branca.


MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	GRAMATURA	TAMANHO		PACOTE COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
		COMPRIMENTO	LARGURA		
AVENTAL	20g	1,00mm	1,40mm	10	300
AVENTAL	30g	1,00mm	1,40mm	10	200
AVENTAL	40g	1,00mm	1,40mm	10	100

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
AVENTAL 20g	13,10	0,53	0,61	0,27	0606529141134	0606529141127
AVENTAL 30g	12,60	0,46	0,63	0,28	0602883920798	0602883920804
AVENTAL 40g	8,70	0,32	0,52	0,31	0618341483378	0618341483361

IMAGEM GRÁFICA:

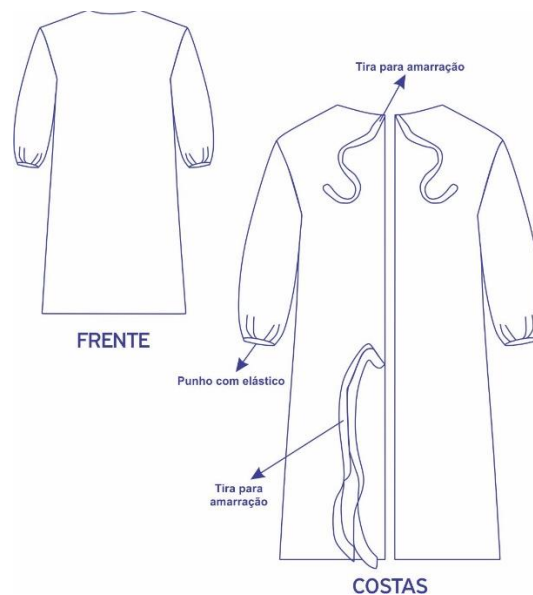

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra respingos de produtos, sangue e fluídos corporais.

EMBALAGEM:

Embalado em pacote com 10 unidades – caixa de transporte com versões de 10, 20, 30 pacotes. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir o pacote com as mãos limpas e secas;
- Retirar o avental a ser utilizado de sua embalagem original;
- Amarrar as tiras externas do avental no pescoço e cintura;
- Após procedimento no qual foi utilizado o avental, o mesmo deverá ser descartado em local apropriado;
- Não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluídos.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;

CONTRAINDICAÇÕES:

O avental descartável em TNT, não estéril, deve ser evitado em procedimentos cirúrgicos estéreis e situações de alto risco biológico. Pessoas alérgicas aos materiais do TNT devem evitar seu uso. Não é indicado para proteção contra substâncias químicas agressivas, e não deve ser usado prolongadamente, devido à possível perda de eficácia como barreira protetora.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138