




FICHA TÉCNICA
Lâmina de bisturi descartável
GLOMED

REG. Nº. 236
 RESPONSÁVEL TÉCNICA:
 SIMARA COLOMBI BUSCH
 COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: LÂMINAS DESCARTÁVEIS

NOME COMERCIAL: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL – GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273459010

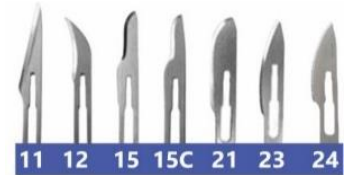

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE



PARAMOUNT SURGIMED LTD, A-106 RIICO INDUSTRIAL AREA BHIWADI RAJASTHAN 301019 INDIA.




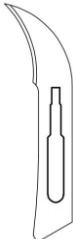
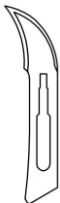


DESCRIÇÃO TÉCNICA:


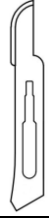

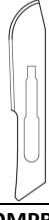
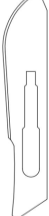
A LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL – GLOMED é um Dispositivo estéril confeccionado em aço carbono. Projetada para realizar o encaixe com os cabos de bisturi. As lâminas cirúrgicas são pequenas, leves e têm uma lâmina fina e afiada.

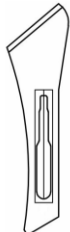





MODELOS DISPONÍVEIS:

A LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL – GLOMED está disponível em vários modelos e tamanhos, atendendo as especificações do, **ISO 7740, BS 5194 & USA DPSC**

CODIGO	DESCRIÇÃO	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE EMBARQUE	CODIGO DE BARRAS EMBALAGEM UNITARIA	CODIGO DE BARRAS CX. COMERCIAL	CODIGO DE BARRAS CX. EMBARQUE
GLLB09	TAMANHO 09 COMPRIMENTO 46mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB10	TAMANHO 10 COMPRIMENTO 42mm 	100	5.000	X	X	X

GLLB10A	TAMANHO 10A COMPRIMENTO 43mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB11	TAMANHO 11 COMPRIMENTO 41mm 	100	5.000	X	0602883920279	0602883920217
GLLB11P	TAMANHO 11P COMPRIMENTO 42mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB12	TAMANHO 12 COMPRIMENTO 38mm 	100	5.000	X	0602883920286	0602883920224
GLLB12D	TAMANHO 12D COMPRIMENTO 38mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB13	TAMANHO 13 COMPRIMENTO 42mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB15	TAMANHO 15 COMPRIMENTO 39mm 	100	5.000	X	0602883920293	0602883920231

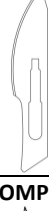GLLB15B	TAMANHO 15B COMPRIMENTO 39mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB15C	TAMANHO 15C COMPRIMENTO 38.6mm  USO EM ODONTOLOGIA	100	5.000	X	0602883921047	0602883921054
GLLB17	TAMANHO 17 COMPRIMENTO 39mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB18	TAMANHO 18 COMPRIMENTO 52.2 mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB19	TAMANHO 19 COMPRIMENTO 51mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB20	TAMANHO 20 COMPRIMENTO 46,5mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB21	TAMANHO 21 COMPRIMENTO 53mm 	100	5.000	X	0602883920309	0602883920248

GLLB22	TAMANHO 22 COMPRIMENTO 56,25mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB23	TAMANHO 23 COMPRIMENTO 51mm 	100	5.000	X	0602883920316	0602883920255
GLLB24	TAMANHO 24 COMPRIMENTO 55.9mm 	100	5.000	X	0602883920323	0602883920262
GLLB25	TAMANHO 25 COMPRIMENTO 51mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB26	TAMANHO 26 COMPRIMENTO 56.5mm 	100	5.000	X	X	X
GLLB36	TAMANHO 36 COMPRIMENTO 58.44mm 	100	5.000	X	X	X



FICHA TÉCNICA
Lâmina de bisturi descartável
GLOMED

REG. Nº. 236
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
GLLB09	X	X	X	X	X	X
GLLB10	X	X	X	X	X	X
GLLB10A	X	X	X	X	X	X
GLLB11	4,80	0,15	0,16	0,47	0602883920279	0602883920217
GLLB11P	X	X	X	X	X	X
GLLB12	5,20	0,15	0,16	0,47	0602883920286	0602883920224
GLLB12D	X	X	X	X	X	X
GLLB13	X	X	X	X	X	X
GLLB15	4,80	0,15	0,16	0,47	0602883920293	0602883920231
GLLB15B	X	X	X	X	X	X
GLLB15C	4,70	0,15	0,16	0,47	0602883921047	0602883921054
GLLB17	X	X	X	X	X	X
GLLB18	X	X	X	X	X	X
GLLB19	X	X	X	X	X	X
GLLB20	X	X	X	X	X	X
GLLB21	7,80	0,15	0,16	0,47	0602883920309	0602883920248
GLLB22	X	X	X	X	X	X
GLLB23	6,80	0,15	0,16	0,47	0602883920316	0602883920255
GLLB24	8,00	0,15	0,16	0,47	0602883920323	0602883920262
GLLB25	X	X	X	X	X	X
GLLB26	X	X	X	X	X	X
GLLB36	X	X	X	X	X	X

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

A LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL – GLOMED é indicada para uso em cabo de bisturi em procedimentos médicos cirúrgicos, curativos e demais procedimentos médicos que necessitam de incisões em pacientes.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Cada lamina é embalada individualmente em um pacote de folha de alumínio para evitar que a borda fique em contato com outra lâmina. Abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa de transporte 5.000 unidades.

ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.



FICHA TÉCNICA
Lâmina de bisturi descartável
GLOMED

REG. Nº. 236
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto;
- Escolha o tamanho da lâmina de bisturi adequado ao procedimento;
- Abrir a embalagem de forma asséptica;
- Encaixe a lâmina no cabo de bisturi com auxílio de uma pinça estéril;
- Após a finalização do procedimento retirar a lâmina do cabo de bisturi com auxílio de uma pinça;
- Descarte a lâmina em local apropriado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Proibido reprocessar.

CONTRAINDICAÇÕES:

A lâmina de bisturi apresenta contraindicações essenciais. Deve ser evitada em pacientes alérgicos aos materiais da lâmina, em procedimentos que demandam extrema precisão, como cirurgias oftalmológicas, e em procedimentos minimamente invasivos que requerem instrumentos específicos. Pacientes com distúrbios de coagulação ou hemorrágicos devem evitar seu uso. Além disso, a reutilização de lâminas descartáveis deve ser evitada para prevenir riscos de contaminação cruzada e manter a eficácia do instrumento. É fundamental observar essas contraindicações ao utilizar a lâmina de bisturi em procedimentos cirúrgicos.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138