



Ficha Técnica
Adaptador para frasco de solução
GLOMED

REG. Nº.:259
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: ADAPTADORES

NOME COMERCIAL: ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÃO - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450048



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

RUA RICARDO GEORG, 1115 – ITROUPAVA CENTRAL

BLUMENAU – SC – BRASIL

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD.

712. ARUNACHAL BUILDING, 19 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI- 110001 INDIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÃO - GLOMED é composto por uma pega ergonômica em Polímero ABS; Ponta perfurante tamanho interno de 35mm, diâmetro de 0,5mm / tamanho externo 20mm, diâmetro de 0,5mm em Polímero ABS, levemente siliconizada, apresentando cortes arredondados em sua ponta; Tampa protetora em Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- **GLAF/S** - Perfurador e conexão Luer fêmea - SLIP (permite a retirada da solução através de uma seringa);
- **GLAF/L** - Perfurador e conexão luer macho - LOCK (permite a retirada da solução por irrigação);
- **GLAF/D** -Perfurador com dupla ponta (permite a conexão em bolsa e frasco de medicação para realizar a diluição);
- Tampa protetora nas duas extremidades
- **GLAF/FILTRO** - Filtro de Ar Hidrofóbico (permite a proteção do sistema durante a aspiração mecânica)

MODELOS DISPONÍVEIS:


MODELO	PONTA/ CONEXÃO	EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES	CAIXA COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
GLAF/S	SLIP	X	X	X
GLAF/L	LOCK	X	X	X
GLAF/D	DUPLO	01	50	500
GLAF/FILTRO	LUER C/ FILTRO HIDROFÓBICO	X	X	X

DIMENSÕES DAS CAIXAS:


PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	EMBALAGEM PRIMARIA	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
ADAPTADOR	2,80	0,31	0,17	0,56	0618341483385	0618341483392	0618341483408

IMAGEM GRÁFICA:

GLAF/S - ADAPTADOR PONTA SIMPLES – SLIP

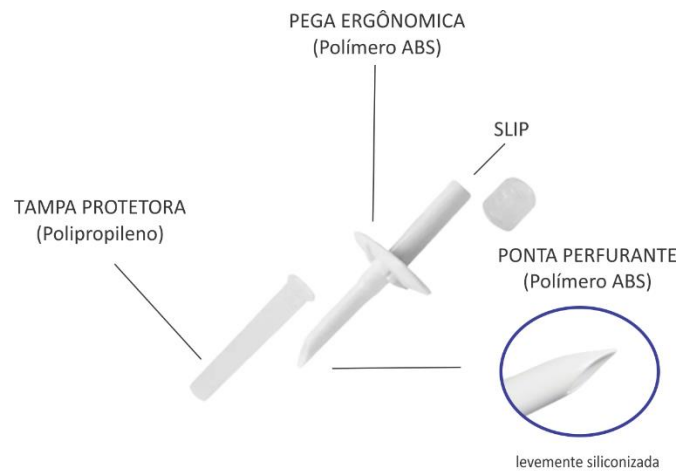


GLAF/L - ADAPTADOR PONTA SIMPLES – LOCK

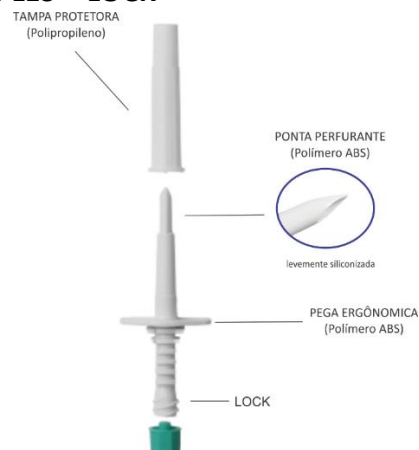

GLAF/D - ADAPTADOR COM DUPLA PONTA PERFURANTE



GLAF/FILTRO - ADAPTADOR COM CONEXÃO LUER E FILTRO DE AR HIDROFÓBICO

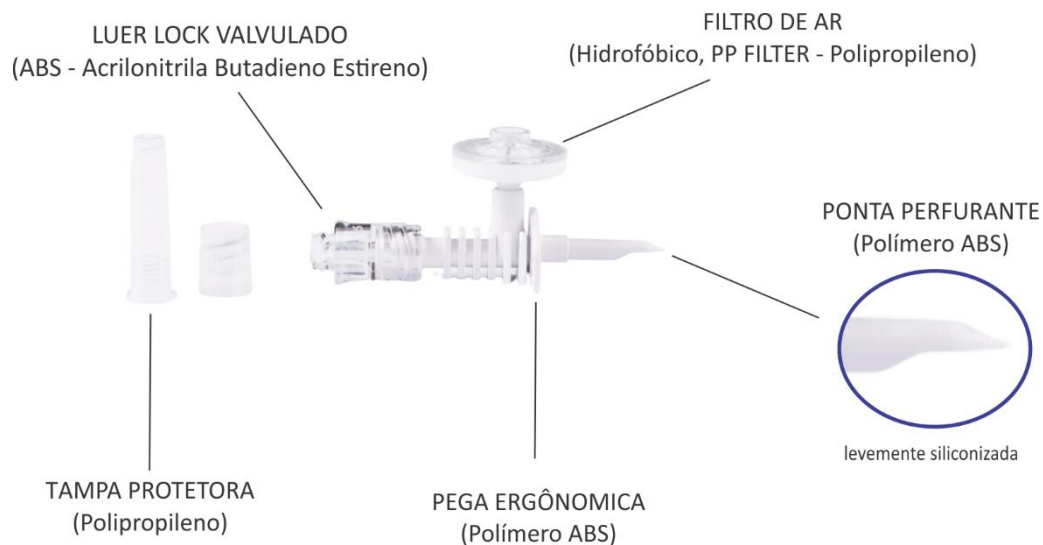

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

O ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÃO - GLOMED é indicado para transferência, mistura ou reconstituição de soluções em sistema fechado, desenvolvido para que não haja contato com o ambiente externo ou perda de substâncias durante procedimentos que utilizam soluções estéreis.

Dispositivo que permite acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado, para diluição de medicação, irrigações, curativos e vários procedimentos com soluções estéreis.



Ficha Técnica

Adaptador para frasco de solução

GLOMED

REG. Nº.:259
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa de transporte com 500 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abra a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Segure o dispositivo pela pega ergonômica e retire a tampa protetora da ponta perfurante;
- Insira a ponta perfurante no frasco da solução que será transferido através de movimentos rotativos;
- Retirar a tampa da outra extremidade e encaixar na conexão desejada;
- Realizar a transferência da solução;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado de acordo com a solução utilizada.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Utilizar técnica asséptica durante o manuseio;
- Não reutilizar o mesmo adaptador, a cada manuseio trocá-lo por outro estéril;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Atóxico. LIVRE DE LÁTEX.

CONTRAINDICAÇÕES:

O adaptador para frasco de solução possui contraindicações importantes, incluindo a incompatibilidade com certas substâncias, a necessidade de vedação adequada nos frascos, cuidados em caso de alergias, a não utilização em frascos previamente abertos, e a proibição de uso com soluções vencidas, visando garantir a segurança e eficácia do produto.



Ficha Técnica
Adaptador para frasco de solução
GLOMED

REG. Nº.:259
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138