

NOME TÉCNICO: SONDAS**NOME COMERCIAL:** SONDA NASOGASTRICA - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273459013

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:**CHANGSHU SUPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.**

Building 2, No.1 Taikang Road, industrial Park, North Region of Zhitang Town, Changshu City, 215531 Jiangsu, P.R. China

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A SONDA NASOGASTRICA – GLOMED é confeccionado em PVC (Cloreto de Polivinila) atóxico, transparente de paredes finas e flexíveis nas opções Curta de 40 a 50 cm de comprimento e Longa de 100 a 120 cm de comprimento, com ponta arredonda e fechada, podendo apresentar 1 ou 2 orifícios laterais. Na outra extremidade do tubo apresenta um conector padrão com ou sem tampa.

MODELOS E VARIAÇÕES DISPONÍVEIS:**GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA**

CODIGO	TAMANHO	COR	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
GLSN-C04	4FR	CINZA	0.80	1.67 ± 0.10	40 A 50 CM	800 UN
GLSN-C06	6FR	VERDE CLARO	1.05	2.00 ± 0.10	40 A 50 CM	800 UN
GLSN-C08	8FR	AZUL	1.50	2.70 ± 0.10	40 A 50 CM	800 UN
GLSN-C10	10FR	PRETO	2.00	3.33 ± 0.10	40 A 50 CM	800 UN
GLSN-C12	12FR	BRANCO	2.45	4.00 ± 0.15	40 A 50 CM	600 UN
GLSN-C14	14FR	VERDE	2.95	4.70 ± 0.20	40 A 50 CM	600 UN
GLSN-C16	16FR	LARANJA	3.40	5.30 ± 0.20	40 A 50 CM	600 UN
GLSN-C18	18FR	VERMELHO	3.90	6.00 ± 0.20	40 A 50 CM	400 UN
GLSN-C20	20FR	AMARELO	4.30	6.67 ± 0.20	40 A 50 CM	400 UN
GLSN-C22	22FR	ROXO	4.50	7.33 ± 0.20	40 A 50 CM	400 UN
GLSN-C24	24FR	AZUL ESCURO	5.00	8.00 ± 0.20	40 A 50 CM	400 UN

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD BARRAS EMBALAGEM UN	COD BARRAS CX COMERCIAL	COD BARRAS CX EMBARQUE
GLSN-C04	3,80	0,32	0,38	0,56	0618341484085	X	0618341483972
GLSN-C06	4,10	0,32	0,38	0,56	0618341484092	X	0618341483989
GLSN-C08	4,60	0,32	0,38	0,56	0618341484108	X	0618341483996
GLSN-C10	5,20	0,32	0,38	0,56	0618341484115	X	0618341484009
GLSN-C12	4,60	0,32	0,38	0,56	0618341484122	X	0618341484016
GLSN-C14	5,20	0,32	0,38	0,56	0618341484139	X	0618341484023
GLSN-C16	5,90	0,32	0,38	0,56	0618341484146	X	0618341484030
GLSN-C18	4,90	0,32	0,38	0,56	0618341484153	X	0618341484047
GLSN-C20	6,10	0,32	0,38	0,56	0618341484160	X	0618341484054
GLSN-C22	6,60	0,32	0,38	0,56	0618341484177	X	0618342484061
GLSN-C24	7,50	0,32	0,38	0,56	0618341484184	X	0618341484078

GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA

CODIGO	TAMANHO	COR	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
GLSN-L04	4FR	CINZA	0.80	1.67 ± 0.10	100 A 120 CM	600UN
GLSN-L06	6FR	VERDE CLARO	1.05	2.00 ± 0.10	100 A 120 CM	600 UN
GLSN-L08	8FR	AZUL	1.50	2.70 ± 0.10	100 A 120 CM	600 UN
GLSN-L10	10FR	PRETO	2.00	3.33 ± 0.10	100 A 120 CM	600 UN
GLSN-L12	12FR	BRANCO	2.45	4.00 ± 0.15	100 A 120 CM	400 UN
GLSN-L14	14FR	VERDE	2.95	4.70 ± 0.20	100 A 120 CM	400 UN
GLSN-L16	16FR	LARANJA	3.40	5.30 ± 0.20	100 A 120 CM	400 UN
GLSN-L18	18FR	VERMELHO	3.90	6.00 ± 0.20	100 A 120 CM	300 UN
GLSN-L20	20FR	AMARELO	4.30	6.67 ± 0.20	100 A 120 CM	300 UN
GLSN-L22	22FR	ROXO	4.50	7.33 ± 0.20	100 A 120 CM	200 UN
GLSN-L24	24FR	AZUL ESCURO	5.00	8.00 ± 0.20	100 A 120 CM	200 UN

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD BARRAS EMBALAGEM UN	COD BARRAS CX COMERCIAL	COD BARRAS CX EMBARQUE
GLSN-L04	4,60	0,33	0,38	0,56	0618341484306	X	0618341484191
GLSN-L06	5,00	0,33	0,38	0,56	0618341484313	X	0618341484207
GLSN-L08	6,10	0,33	0,38	0,56	0618341484320	X	0618341484214
GLSN-L10	7,30	0,33	0,38	0,56	0618341484337	X	0618341484221
GLSN-L12	6,10	0,33	0,38	0,56	0618341484344	X	0618341484238
GLSN-L14	7,10	0,33	0,38	0,56	0618341484351	X	0618341484245
GLSN-L16	8,30	0,33	0,38	0,56	0618341484368	X	0618341484252
GLSN-L18	7,60	0,33	0,38	0,56	0618341484375	X	0618341484269
GLSN-L20	9,40	0,33	0,38	0,56	0618341484382	X	0618341484276
GLSN-L22	6,90	0,33	0,38	0,56	0618341484399	X	0618341484283
GLSN-L24	8,00	0,33	0,38	0,56	0618341484405	X	0618341484290

IMAGEM GRÁFICA:

GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA



GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para administrar alimentos, medicamentos ou drenar conteúdo gástrico (estômago), é um dispositivo introduzido no estômago através do nariz ou da boca do paciente. Destina-se a utilização a pacientes incapazes de ingerir alimentos através da mastigação e deglutição normais.

EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente e/ ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Disponível em caixas com 200, 300, 400, 600 e 800 unidades.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade da embalagem e validade do produto;
- Escolha o tamanho da sonda adequado ao paciente;
- Retire o produto da embalagem através de técnicas assépticas;
- Medir e marcar o comprimento da inserção da sonda conforme protocolo da instituição;
- Incline a cabeça do paciente e introduza suavemente a sonda através da narina, solicite ao paciente que realize movimentos de deglutição;
- Introduzir a sonda até a marcação indicada;
- Realizar testes de verificação conforme protocolo da instituição;
- Realize a fixação da sonda no nariz ou bochecha do paciente;
- Conecte a sonda com o dispositivo adequado;
- O tempo de permanência é definido conforme protocolo da instituição;
- Descarte o produto após a sua utilização em local adequado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno.
- Atóxico, Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

A sonda nasogástrica apresenta contra-indicações importantes. Deve ser evitada em pacientes com obstrução nasal grave, histórico de sangramentos nasais recorrentes, fraturas de base de crânio ou lesões nasais, e em casos de dificuldades respiratórias graves. A inserção e manutenção da sonda devem ser realizadas por profissionais de saúde qualificados para garantir a segurança do paciente

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138