



Ficha Técnica
FITA ADESIVA MICROPOROSA
GLOMED

REG. Nº 277
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: ESPARADRAPOS E FITAS ADESIVAS

NOME COMERCIAL: FITA ADESIVA MICROPOROSA - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450052

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CP., LTD

NO. 118 YUEGUI SOUTH ROAD, CITY WEST NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A Fita Adesiva Microporosa – GLOMED é composta por fibras de poliéster poroso, o que permite a passagem do ar e da umidade, ajudando na ventilação da pele. Sua camada adesiva é formulada com um adesivo acrílico hipoalergênico, projetado para oferecer aderência segura sem causar irritações cutâneas. A fita é acondicionada em carretel e capa de polietileno. Atóxico, Livre de Látex.



Ficha Técnica

FITA ADESIVA MICROPOROSA

GLOMED

REG. Nº 277
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO	EMBALAGEM UNITÁRIA	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
GLMP12.5X10	12.5mm x 10m	12	144
GLMP25X10	25mm x 10m	12	96
GLMP50X10	50mm x 10m	12	96
GLMP100X10	100mm x 10m	12	24
GLMP100X4.5	100mm x 4.5m	12	24


DIMENSÕES DA FITA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS UNITARIA
GLMP12.5X10	17g	0,55 CM	0,2 CM	0,55 CM	0070341197462
GLMP25X10	29g	0,55 CM	0,35 CM	0,55 CM	0070341197486
GLMP50X10	55g	0,55 CM	0,6 CM	0,55 CM	0070341197509
GLMP100X10	99g	0,55 CM	0,11 CM	0,55 CM	0070341197523
GLMP100X4.5	66g	0,55 CM	0,11 CM	0,55 CM	0070341197547

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS EMBARQUE
GLMP12.5X10	2,800kg	0,235	0,14	0,34	0070341197455
GLMP25X10	3,100kg	0,235	0,14	0,35	0070341197479
GLMP50X10	5,700kg	0,25	0,24	0,355	0070341197493
GLMP100X10	2,600kg	0,235	0,12	0,36	0070341197516
GLMP100X4.5	1,900kg	0,235	0,115	0,345	0070341197530

IMAGEM GRÁFICA:

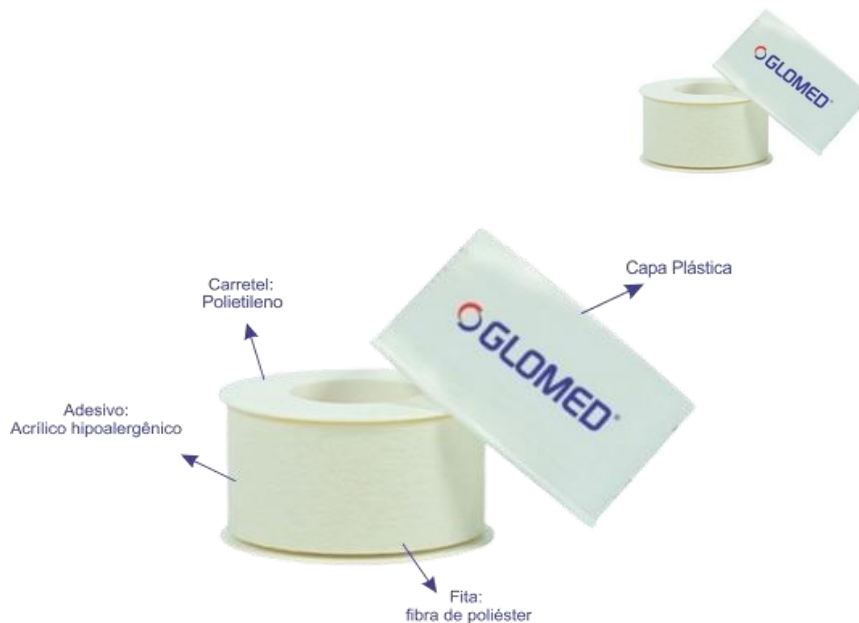

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

A Fita Adesiva Microporosa é indicada para fixação direta de curativos, bandagens e dispositivos médicos na pele, sobre ferimentos superficiais. Sua composição porosa possibilita a ventilação celular sem causar danos ou irritação. Devido à sua suavidade, é especialmente indicada para peles sensíveis, como as de crianças e idosos.

EMBALAGEM:

A Fita adesiva Microporosa é acondicionada em carretel com capa de polietileno. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

Cada embalagem contém:

- 1 Rolo de Fita Adesiva Microporosa;
- 1 Instrução de Uso;



Ficha Técnica
FITA ADESIVA MICROPOROSA
GLOMED

REG. Nº 277
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

Caixa de Transporte de papel cartão de 20 a 500 unidades de fita adesiva microporosa; **PRODUTO NÃO ESTERIL.**

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

APLICAÇÃO DA FITA:

- Verifique a integridade e validade do produto antes de usar;
- Selecione o tipo e o tamanho adequados da fita para cobrir a área desejada;
- Limpe a área removendo a umidade ou sujeira;
- Aplique a fita suavemente sobre a pele, evitando esticá-la;
- Fixe toda a fita, pressionando levemente do centro para as bordas, garantindo uma adesão uniforme.

REMOÇÃO DA FITA:

- Comece removendo pela borda da fita, puxando suavemente;
- Estabilize a pele com um dedo e remova a fita lentamente na direção do crescimento do pelo, para minimizar o desconforto;
- Após o uso descarte o produto em local adequado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Evite esticar em excesso durante a aplicação para evitar desconforto.
- Não use em feridas abertas ou pele com erupções graves.
- Não utilize em pacientes alérgicos a adesivos médicos.
- Interrompa o uso se houver irritação na pele e consulte um profissional.
- Evite o uso prolongado em áreas sensíveis ou pacientes vulneráveis.



Ficha Técnica
FITA ADESIVA MICROPOROSA
GLOMED

REG. Nº 277
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

- Armazene adequadamente em local fresco e seco, protegido da luz solar direta.
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação.
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, proibido reprocessamento, não reutilize.
- Atóxico, Livre de Látex

CONTRAINDICAÇÃO:

A fita adesiva microporosa não é recomendada para pacientes com histórico de alergia a adesivos médicos ou a qualquer componente da fita. Caso ocorram sintomas como irritação, vermelhidão, coceira intensa ou qualquer outra reação adversa na pele após a aplicação da fita, é importante interromper imediatamente o uso e buscar orientação de um profissional de saúde.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
- O produto deve ser transportado em sua embalagem original.
- Ao empilhar caixas durante o transporte, deve-se garantir uma disposição estável para evitar danos à embalagem e ao produto.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138