



# Ficha Técnica

## Máscara Descartável

### GLOMED

REG. Nº.: 209-02  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

**NOME TÉCNICO:** MÁSCARA FACIAL CIRÚRGICA  
**NOME COMERCIAL:** MÁSCARA DESCARTÁVEL - GLOMED  
**REGISTRO ANVISA:** 80273450047

**IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:**  
**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**  
CNPJ: 03.033.589/0001-12  
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central  
Blumenau – SC – Brasil  
CEP 89069-101  
SAC 0800-645-2480

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**  
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**  
**GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD**  
Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P.R. China

### DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL GLOMED é confeccionada em tecido não tecido 100% Polipropileno, possuindo a gramatura de 20g/m<sup>2</sup> em todas as suas camadas, sendo 2 camadas em TNT e 1 uma camada interna de FILTRO MELT BLOWN (com eficiência de filtragem BFE: ≥95%) totalizando três camadas. Apresenta clipe nasal ajustável totalmente revestido, atóxica, hipoalérgica. Disponível na cor **BRANCA, PRETA, ROSA**. Com opções em **Elástico** ou em **Tiras**.

### MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	COR	LARG. FECHADA cm	LARG. ABERTA cm	COMP. MASCARA cm	COMP. TIRAS x ELÁSTICO cm	CLIP NASAL cm	G/M <sup>2</sup>	FILTRO BFE	MAT. PRIMA
TIRAS	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	40,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	ROSA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT
ELÁSTICO	PRETA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g	FILTRO MELT BLOWN	Polipropileno TNT



## Ficha Técnica

### Máscara Descartável

### GLOMED

REG. Nº.: 209-02  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

#### DIMENSÕES DA CAIXA:

MODELO	COR	CX/PCT EMB. COMERCIAL	PESO CX. EMBARQUE	LARG CX. EMBARQUE	ALT CX. EMBARQUE	COMP CX. EMBARQUE	COD. BARRAS COMERCIAL	COD BARRAS EMBARQUE
TIRAS	BRANCA	PACOTE	14,90	0,38	0,57	0,50	0606529141110	0606529141103
ELÁSTICO	BRANCA	CAIXA	6,20	0,39	0,30	0,52	0606529141196	0606529141189
ELÁSTICO	BRANCA	PACOTE	12,50	0,39	0,49	0,52	0606529141097	0606529141080
ELÁSTICO	ROSA	CAIXA	6,40	0,39	0,30	0,52	0602883920545	0602883920538
ELÁSTICO	PRETA	CAIXA	6,20	0,39	0,30	0,52	0602883920569	0602883920552

#### IMAGEM GRÁFICA:



#### INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea e projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias.



## Ficha Técnica Máscara Descartável GLOMED

REG. Nº.: 209-02  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

### **EMBALAGEM:**

MODELO	EMBALAGEM	QTDE POR EMBALAGEM	CAIXA TRANSPORTE
MÁSCARA COM TIRAS	PLÁSTICO	50 UNIDADES	80 PACOTES
MÁSCARA COM ELÁSTICO	PLÁSTICO	50 UNIDADES	100 PACOTES
MÁSCARA COM ELÁSTICO	CAIXA	50 UNIDADES	40 CAIXAS
MÁSCARA COM ELÁSTICO ROSA/PRETO	CAIXA	50 UNIDADES	40 CAIXAS

Rotulagem conforme RDC 751/2022.

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

### **ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Abra a caixa/pacote e retire a máscara;
- Faça o manuseio pelas alças/tiras com as mãos higienizadas;
- Posicione as dobras para baixo no lado de fora da máscara e as dobras para cima para o lado de dentro da máscara;
- Certifique-se que a máscara esta rente ao rosto, cobrindo nariz e a boca;
- Prenda a máscara atrás das orelhas seja com elástico ou amarrando atrás da cabeça com as tiras;
- Ajuste o clipe nasal ao contorno do nariz;
- Evite tocar na parte da frente quando estiver colocando-a;
- Não usar por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida;
- Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras;
- Descarte em um local apropriado.

### **PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- O uso deve ser individual;
- Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar higienize suas mãos;
- Se precisar mexer ou ajustar a máscara, fazer pelo elástico ou amarração;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Produto de uso único, não reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente
- Não é recomendado o uso da mesma máscara por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida por outra limpa e seca;
- Descartar em local apropriado



**Ficha Técnica**  
**Máscara Descartável**  
**GLOMED**

REG. Nº.: 209-02  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

**CONTRAINDICAÇÕES:**

Máscaras descartáveis triplas com elástico têm contraindicações importantes a serem observadas. Não são adequadas para indivíduos com dificuldades respiratórias ou que necessitem de assistência para remover a máscara. Também não são recomendadas para crianças muito pequenas, pessoas alérgicas aos materiais da máscara e em situações que demandem uma máscara com classificação específica de filtração ou proteção. Além disso, seu uso prolongado pode causar desconforto e irritação na pele. Considerar essas contraindicações é crucial para garantir a segurança e eficácia na proteção respiratória.

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138