



Ficha Técnica Cateter Intravenoso GLOMED

REG. N°. 225-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: CATETERES

NOME COMERCIAL: CATETER INTRAVENOSO - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273459009



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD.

712. ARUNACHAL BUILDING, 19 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI- 110001 INDIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Dispositivo para infusão intravenosa é composto por uma cânula em Teflon, radiopaca, flexível. Agulha em aço inoxidável com diâmetro e comprimento variado, bisel trifacetado e parede finas. Canhão translúcido, colorido conforme os tamanhos da cânula.

O Cateter intravenoso – GLOMED apresentam-se em diversos calibres, codificados por cor conforme padrão exigido em norma. Cada calibre corresponde às necessidades de cada paciente, tais como neonatais, pediátricos e adultos (quanto maior a numeração, menor o calibre).


MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	COR	VELOCIDADE DO FLUXO	DIAMETRO INTERNO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM UNITARIA UNIDADES	CAIXA COMERCIAL UNIDADES	CAIXA EMBARQUE UNIDADES
14G	LARANJA	305	1,7 mm	45 mm	01	100	1.000
16G	CINZA	200	1,3 mm	45 mm	01	100	1.000
18G	VERDE	95	0,9 mm	45 mm	01	100	1.000
20G	ROSA	65	0,8 mm	32 mm	01	100	1.000
22G	AZUL	36	0,6 mm	25 mm	01	100	1.000
24G	AMARELO	23	0,5 mm	19 mm	01	100	1.000

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS UNITÁRIA	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
CATETER 14G	6,10	0,29	0,19	0,54	0606529140946	0606529140885	0606529140823
CATETER 16G	6,00	0,29	0,19	0,54	0606529140953	0606529140892	0606529140830
CATETER 18G	5,80	0,29	0,19	0,54	0606529140960	0606529140908	0606529140847
CATETER 20G	5,70	0,29	0,19	0,54	0606529140977	0606529140915	0606529140854
CATETER 22G	5,50	0,29	0,19	0,54	0606529140984	0606529140922	0606529140861
CATETER 24G	5,50	0,29	0,19	0,54	0606529140991	0606529140939	0606529140878

IMAGEM GRÁFICA:

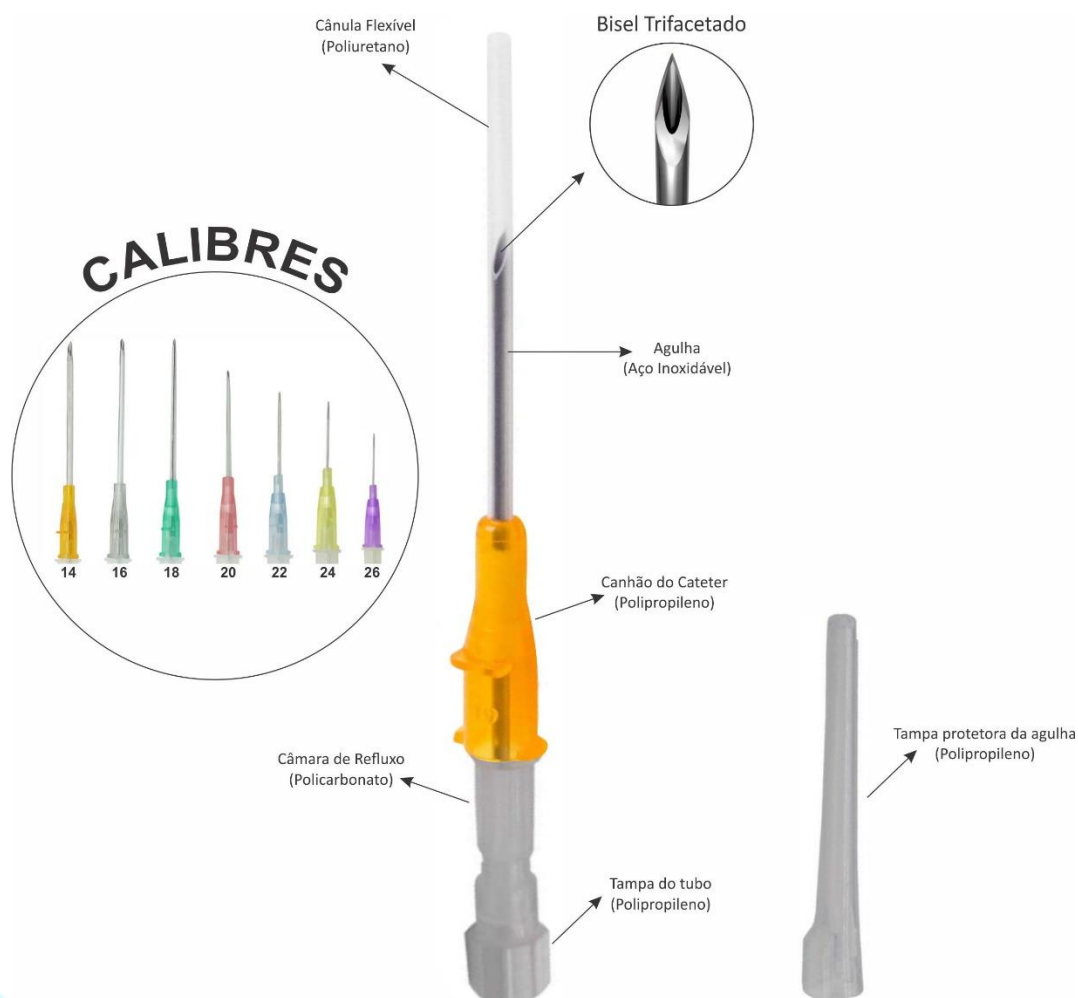



Ficha Técnica

Cateter Intravenoso

GLOMED

REG. N.º: 225-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

O Cateter intravenoso – GLOMED é indicado para introduzir soluções parenterais, de curta a média duração através da introdução do cateter no vaso sanguíneo periférico;

Contraindicada em casos de hiperemia, flebites, edemas, escoriações, queimaduras e fraturas no local a ser puncionado.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa comercial com 100 unidades; Caixa de transporte 1.000 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto;
- Selecione o calibre apropriado de acordo com as necessidades clínicas do paciente;
- Garroteie o local a ser puncionado, aproximadamente de 5 a 10 cm do local da punção venosa, a fim de propiciar a dilatação da veia;
- Realize a assepsia do local escolhido, usando PVPI alcoólico ou álcool a 70%, partindo da porção distal do braço ou de baixo para cima, sempre no mesmo sentido;
- Com o bisel voltado para cima introduza o cateter na pele, observado o retorno do sangue através do mandril; desgarrotear o braço do paciente e retirar a agulha cuidadosamente;
- Descarte a agulha em um coletor perfuro-cortante;
- Conecte o cateter a um equipo de infusão;
- Realize a fixação na pele do paciente, deixando livre o local de conexão.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente.



Ficha Técnica
Cateter Intravenoso
GLOMED

REG. Nº.: 225-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CONTRAINDICAÇÕES:

O cateter intravenoso sem sistema de segurança não é recomendado para tratamentos intravenosos a longo prazo, pacientes com histórico de alergias, procedimentos que necessitam alta segurança, prevenção de infecções, ou pacientes com veias frágeis, devido ao risco aumentado de complicações e falta de segurança.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138