



Ficha Técnica

Cateter Intravenoso com sistema de segurança - GLOMED

REG. Nº.226-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: CATETERES

NOME COMERCIAL: CATETER INTRAVENOSO COM SISTEMA DE SEGURANÇA – GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273459025

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

DISPOSABLE HEALTH AND LIFE CARE LIMITED.

PLOT 1 & 2, PHASE – II , SECTOR-59, BALLABHGARH, FARIDABAD, HARYANA 121004, INDIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Dispositivo para infusão intravenosa é composto por uma cânula em poliuretano, radiopaca, flexível. Agulha em aço inoxidável com diâmetro e comprimento variado, bisel trifacetado e parede finas. Canhão translúcido, colorido conforme os tamanhos da cânula.

O Cateter intravenoso – GLOMED apresenta-se em diversos calibres, codificados por cor conforme padrão exigido em norma. Cada calibre corresponde às necessidades de cada paciente, tais como neonatais, pediátricos e adultos (quanto maior a numeração, menor o calibre).

MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	CALIBRE	COR	VELOCIDADE DO FLUXO	CATETER		EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA	CAIXA COMERCIAL UNIDADES	CAIXA EMBARQUE UNIDADES
				DIÂMETRO INTERNO	COMPRIMENTO			
GLC14GS	14G	LARANJA	305	1,7 mm	45 mm	01	100	1.000
GLC16GS	16G	CINZA	200	1,3 mm	45 mm	01	100	1.000
GLC18GS	18G	VERDE	95	0,9 mm	45 mm	01	100	1.000
GLC20GS	20G	ROSA	65	0,8 mm	32 mm	01	100	1.000
GLC22GS	22G	AZUL	36	0,6 mm	25 mm	01	100	1.000
GLC24GS	24G	AMARELO	23	0,5 mm	19 mm	01	100	1.000

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

Ficha Técnica

Cateter Intravenoso com sistema de segurança - GLOMED

REG. Nº.226-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG.	ALT.	COMP.	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITARIA	COD. BARRAS CAIXA COMERCIAL	COD. BARRAS CAIXA EMBARQUE
GLC14GS	7,00	0,41	0,125	0,75	0602883920491	0602883920484	0602883920477
GLC16GS	7,00	0,41	0,125	0,75	0602883920521	0602883920514	0602883920507
GLC18GS	6,90	0,41	0,125	0,75	0602883920170	0602883920132	0602883920095
GLC20GS	6,80	0,41	0,125	0,75	0602883920187	0602883920149	0602883920101
GLC22GS	6,40	0,41	0,125	0,685	0602883920194	0602883920156	0602883920118
GLC24GS	5,70	0,41	0,125	0,605	0602883920200	0602883920163	0602883920125

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

O Cateter intravenoso com sistema de segurança – GLOMED é indicado para introduzir soluções parenterais, de curta a média duração através da introdução do cateter no vaso sanguíneo periférico. Contraindicada em casos de hiperemia, flebites, edemas, escoriações, queimaduras e fraturas no local a ser puncionado.

EMBALAGEM/ESTERILIZAÇÃO:

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa comercial com 100 unidades; Caixa de transporte 1.000 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto;
- Selecione o calibre apropriado de acordo com as necessidades clínicas do paciente;
- Garroteie o local a ser puncionado, aproximadamente de 5 a 10 cm do local da punção venosa, a fim de propiciar a dilatação da veia;
- Realize a assepsia do local escolhido, usando PVPI alcoólico ou álcool a 70%, partindo da porção distal do braço ou de baixo para cima, sempre no mesmo sentido;
- Com o bisel voltado para cima introduza o cateter na pele, observado o retorno do sangue através do mandril; desgarrotear o braço do paciente e retirar a agulha cuidadosamente;
- Descarte a agulha em um coletor perfuro-cortante;
- Conecte o cateter a um equipo de infusão;
- Realize a fixação na pele do paciente, deixando livre o local de conexão.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

CONTRAINDICAÇÕES:

O cateter intravenoso com sistema de segurança é uma opção segura, com contraindicações limitadas. É apropriado para a maioria dos pacientes, exceto para aqueles com alergia aos materiais do cateter. A inserção deve ser realizada por pessoal treinado, e não é a melhor escolha em situações de emergência. Pacientes com veias frágeis ou histórico de complicações devem ser monitorados de perto.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138