

**NOME TÉCNICO:** LUVAS CIRÚRGICAS**NOME: COMERCIAL:** LUVAS CIRÚRGICAS - GLOMED**CONTRATO COMPULSORIO:**

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – NP/ICEPEX-I 00267-12-1

REGISTRO ANVISA: 80273459024 – CA: 51.239

**IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:****OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:****ANRUI MEDICAL EQUIPMENTS CO.,LTD**

Renhe Industrial District Tianchang City, Anhui Province, China

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

As Luvras cirúrgicas são confeccionadas em látex de borracha natural, com alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, texturizada na superfície dos dedos e palma mão, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, embaladas individualmente, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica. Produto estéril.

**COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL.****MODELOS DISPONÍVEIS:**

TAM.	MATERIAL	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM PRIMARIA PARES	EMBALAGEM COMERCIAL PARES	CAIXA DE EMBARQUE PARES
6,0	LÁTEX COM PÓ	ESTÉRIL	1	50	500
6,5	LÁTEX COM PÓ	ESTÉRIL	1	50	500
7,0	LÁTEX COM PÓ	ESTÉRIL	1	50	500
7,5	LÁTEX COM PÓ	ESTÉRIL	1	50	500
8,0	LÁTEX COM PÓ	ESTÉRIL	1	50	500
8,5	LÁTEX COM PÓ	ESTÉRIL	1	50	500

**DIMENSÕES DA CAIXA:**

TAM.	PESO	LARG.	ALT.	COMP.	COD. BARRA EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. DE BARRAS CX. COMERCIAL	COD. DE BARRAS CAIXA EMBARQUE
6,0	14,30	0,26	0,43	0,67	0606529140427	0606529140359	0606529140281
6,5	14,80	0,26	0,43	0,67	0606529140434	0606529140366	0606529140298
7,0	15,80	0,26	0,43	0,67	0606529140441	0606529140373	0606529140304
7,5	16,70	0,26	0,43	0,67	0606529140458	0606529140380	0606529140311
8,0	17,70	0,26	0,43	0,67	0606529140465	0606529140397	0606529140328
8,5	18,40	0,26	0,43	0,67	0606529140472	0606529140403	0606529140335

**DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:**

TAMANHO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA ÁREA LISA (MM)	ESPESSURA ÁREA COM TEXTURA (MM)
6,0	77 ± 5mm	≥ 260	≥ 0,10	≥ 0,13
6,5	83 ± 5mm	≥ 260	≥ 0,10	≥ 0,13
7,0	89 ± 5mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
7,5	95 ± 5mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
8,0	102 ± 6mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
8,5	108 ± 6mm	≥ 280	≥ 0,10	≥ 0,13

**Nota:** Atendendo as medidas estabelecidas pelo padrão ABNT NBR ISO 10282:2014

**IMAGEM GRÁFICA:**

**Superfície e  
ponta dos dedos  
texturizadas**



- Pó bioabsorvível
- Alta sensibilidade
- Esterilizadas a ETO
- Superfície texturizada

**INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

A Luva Cirúrgica GLOMED é indicada em procedimentos cirúrgicos invasivos, nos quais exista a necessidade de proteção do profissional e do paciente.

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa comercial com 50 pares; Caixa de transporte 500 pares.

**ESTERILIZADO POR RAO GAMA, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Verifique o tamanho adequado, conforme indicado na embalagem;
- Realizar a assepsia com lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas antes de calçar as luvas.
- Abra a parte superior da embalagem;
- Retire a luva da embalagem;
- Coloque uma luva na mão esquerda e uma luva na mão direita;
- Para retirar as luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Contém látex natural, pode causar alergia;
- Existem casos isolados de reações alérgicas ao látex;
- Havendo irritação da pele, suspenda o uso do material e procure orientação médica;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Produto de uso único - nunca reutilizar a luva - destruir após o uso;
- Desprezar a luva sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Observe o tamanho da luva antes do uso para evitar que a mesma se rasgue;
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais das mãos antes de calçar as luvas;
- Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção das luvas quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

As luvas cirúrgicas de látex com pó estéril têm contraindicações importantes a serem observadas. Não devem ser usadas por pacientes alérgicos ao látex, por aqueles com sensibilidade ao pó ou reações adversas a luvas, e em situações onde a presença de partículas de pó seja indesejada. Para pacientes com histórico de problemas respiratórios causados por partículas de pó, é preferível escolher luvas sem pó ou alternativas mais adequadas. É fundamental considerar essas contraindicações para garantir um uso seguro das luvas cirúrgicas.

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.  
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:**

- As Luvas para procedimento GLOMED se enquadram na NR-6 como EPI para proteção de membros superiores – item (e) LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS;

**CLASSIFICAÇÃO:** As luvas Cirúrgicas GLOMED atendem a **PORTARIA DO MTP Nº 672/2021, ABNT NBR ISO 10282 E NR6 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.**

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138