



Ficha Técnica

Luva para procedimento GLOMED

REG. Nº.: 208-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: LUVAS DESCARTÁVEIS LÁTEX COM PÓ

NOME COMERCIAL: LUVA PARA PROCEDIMENTO - GLOMED

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA: 51.573

REGISTRO ANVISA: 80273450056

CONTRATO COMPULSORIO



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

TEC GLOVES AMERICAS S.A.

Calle La Martona 280. Parque Industrial Cañuelas, Ruta 6 Km 96.700, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, Argentina

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Luva para procedimento, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, levemente lubrificado com pó bioabsorvível atóxico.

COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL.

MODELOS DISPONÍVEIS:

TAMANHOS	PESO	LARG	ALT	COMP	EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE TRANSPORTE	COD BARRA. CAIXA COMERCIAL	COD. BARRAS CAIXA DE TRANSPORTE
PP	5,50	0,24	0,21	0,31	100	1.000	0606529141004	0606529141042
P	5,90	0,24	0,21	0,31	100	1.000	0606529141011	0606529141059
M	6,30	0,24	0,21	0,31	100	1.000	0606529141028	0606529141066
G	6,80	0,24	0,21	0,31	100	1.000	0606529141035	0606529141073

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

Ficha Técnica

Luva para procedimento

GLOMED

REG. Nº.: 208-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:

TAMANHO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA ÁREA LISA (mm)	CENTRO APROXIMADO DA PALMA ÁREA LISA
PP	≤ 80	220	$\geq 0,08$	$\leq 2,00$
P	80 ± 10 mm	220	$\geq 0,08$	$\leq 2,00$
M	95 ± 10 mm	230	$\geq 0,08$	$\leq 2,00$
G	110 ± 10 mm	230	$\geq 0,08$	$\leq 2,00$

Nota: Atendendo as medidas estabelecidas pelo padrão ABNT NBR ISO 11193-1-2015 e Portaria do MTP 672/2021.

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

As Luvas para procedimentos não cirúrgicos de Látex – marca GLOMED, são utilizadas por profissionais em procedimentos gerais onde não haja a necessidade de uma luva esterilizada. Podem ser utilizadas também em procedimentos onde haja a necessidade de uma luva esterilizada, como, por exemplo, no caso de intervenções cirúrgicas, curativos em queimados, etc. Neste caso a luva deverá ser esterilizada no hospital através de óxido de etileno.

EMBALAGEM:

Embalado em caixa com 100 unidades – caixa de transporte com 10 caixas. Rotulagem conforme RDC 751/2022.

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.



Ficha Técnica

Luva para procedimento

GLOMED

REG. Nº.: 208-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas.
- Verifique a dimensão da luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais das mãos antes de calçar as luvas.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Para calçar as luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da luva.
- Para retirar as luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Contém látex de borracha natural;
- Existem casos isolados de reações alérgicas ao látex;
- Havendo irritação da pele, suspenda o uso do material e procure orientação médica;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Produto de uso único - Nunca reutilizar a luva; Destruir após o uso;
- Desprezar a luva sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Observe o tamanho da luva antes do uso para evitar que a mesma se rasgue;
- Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente.

CONTRAINDICAÇÃO:

Luvas de procedimento de látex com pó têm contraindicações importantes a considerar. Devem ser evitadas por pacientes alérgicos ao látex, em procedimentos que necessitem de esterilidade absoluta e por aqueles com sensibilidade ao pó ou histórico de reações adversas a luvas. Também não são apropriadas em situações onde a presença de partículas de pó é indesejada, como em procedimentos oftalmológicos. Pacientes com problemas respiratórios causados pela inalação de partículas de pó devem escolher luvas sem pó ou alternativas mais adequadas para prevenir complicações respiratórias. Considerar essas contraindicações é crucial para assegurar a segurança dos procedimentos de saúde.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

- As Luvas para procedimento GLOMED se enquadram na NR-6 como EPI para proteção de membros superiores – item (e) LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS;



Ficha Técnica
Luva para procedimento
GLOMED

REG. Nº.: 208-02
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CLASSIFICAÇÃO: As luvas para procedimento GLOMED atendem as **Portaria do MTP 672/2021, 11193-1-2015** Luvas para exame médico de uso único, Parte 1: Especificação para Luvas produzidas de látex de borracha ou solução de borracha e **NR6 do MINISTÉRIO DO TRABALHO.**

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138