

Ficha Técnica
Touca Descartável
GLOMED

REG. Nº.: 211-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: VESTIMENTA CIRÚRGICA

NOME COMERCIAL: TOUCA DESCARTÁVEL - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450009

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD

Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Confeccionado em Tecido Não Tecido 100% Polipropileno. Possui elástico nas extremidades para facilitar o ajuste. Cor branca. Livre de Látex.

MODELO DISPONÍVEIS:

PRODUTO	GRAMATURA	EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES	EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
TOUCA	20g	X	100	5.000

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
TOUCA	12,0	0,58	0,38	0,26	0606529141141	20606529141145

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicadas para proteção capilar, evitando a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza.

EMBALAGEM:

Embalado em pacote com 100 unidades – caixa de transporte com 50 pacotes. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir o pacote com as mãos limpas e secas;
- Retirar a touca a ser utilizada de sua embalagem original;
- Ajustar o elástico das laterais da touca;
- Após procedimento no qual foi utilizado a touca, a mesmo deverá ser descartada;
- Descartar em local apropriado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso.

Ficha Técnica
Touca Descartável
GLOMED

REG. Nº.: 211-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CONTRAINDICAÇÕES:

A touca descartável em TNT não estéril é contraindicada para procedimentos cirúrgicos e ambientes que requerem esterilização, pacientes alérgicos ao TNT, aqueles com sensibilidade cutânea ou histórico de irritações na pele relacionadas ao TNT, e em situações que exigem proteção máxima contra contaminação, como em salas de cirurgia. O uso adequado deve seguir as diretrizes específicas do ambiente clínico e as necessidades do paciente para assegurar segurança e eficácia.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138