

## Ficha Técnica Coletor de Urina Sistema Fechado - GLOMED

REG. Nº.: 220-01  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138


**NOME TÉCNICO:** BOLSAS COLETORAS

**NOME COMERCIAL:** COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO- GLOMED

**REGISTRO ANVISA:**

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO: **80273450019**

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO: **80273450020**

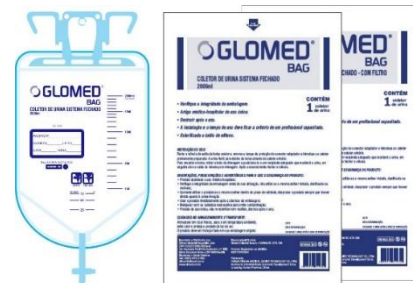

**IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:**

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**

**HUNAN PINGAN MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD**

Number 8, Industrial Road ,Economic Development Zone, Li county, Hunan Province, China

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

Composto de um tubo 100cm de PVC ligado a bolsa coletora em PVC graduada, com capacidade de 500 a 2000ml e válvula antirrefluxo de PVC na parte inferior, dependendo do modelo pode apresentar configurações diferentes. Segue especificações:

**MODELOS DISPONÍVEIS:**

| MODELO     | CAPACIDADE | MATERIAL | EMBALAGEM PRIMARIA<br>UNIDADES | EMBALAGEM COMERCIAL<br>UNIDADES | CAIXA DE EMBARQUE<br>UNIDADES |
|------------|------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| SEM FILTRO | 2000 ML    | PVC      | 01                             | X                               | 100                           |
| COM FILTRO | 2000 ML    | PVC      | 01                             | X                               | 100                           |

**DIMENSÕES DAS CAIXAS:**

| PRODUTO    | PESO  | LARG | ALT  | COMP | COD. BARRAS<br>UNITÁRIA | COD. DE BARRAS<br>COMERCIAL | COD. DE BARRAS<br>EMBARQUE |
|------------|-------|------|------|------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| SEM FILTRO | 10,30 | 0,37 | 0,35 | 0,54 | X                       | 0606529140588               | 0606529140571              |
| COM FILTRO | 10,60 | 0,36 | 0,34 | 0,55 | X                       | 0606529140601               | 20606529140605             |

## Ficha Técnica Coletor de Urina Sistema Fechado - GLOMED

REG. Nº.: 220-01  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

### IMAGEM GRÁFICA:


#### COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO



## Ficha Técnica Coletor de Urina Sistema Fechado - GLOMED

REG. Nº.: 220-01  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

### COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO

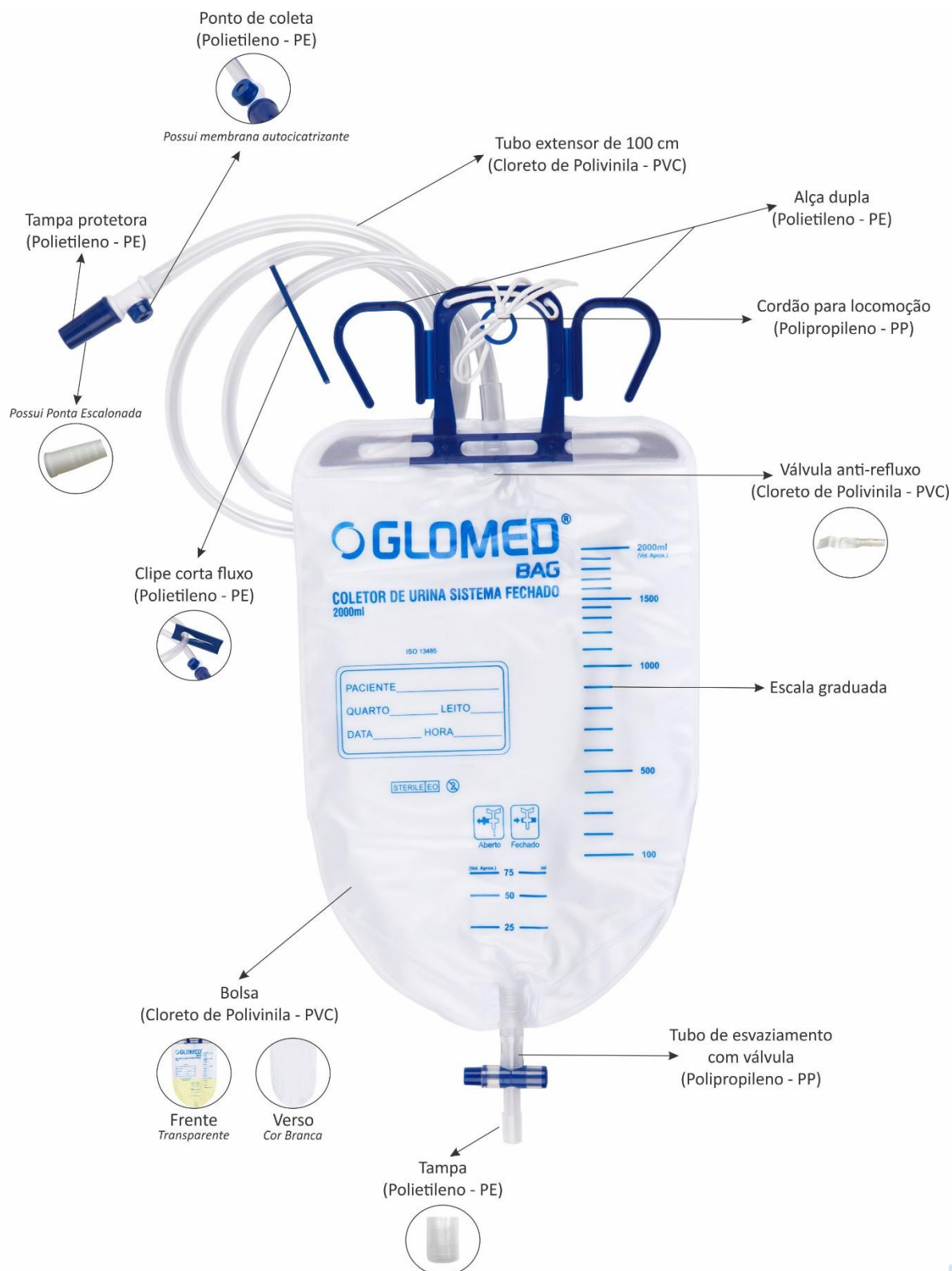

## **Ficha Técnica**

### **Coletor de Urina Sistema Fechado - GLOMED**

REG. Nº.: 220-01  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

#### **INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

Os coletores de urina da marca GLOMED são indicados para drenagem, coleta e mensuração de diurese em pacientes submetidos à sondagem vesical de demora ou de alívio. Geralmente estes pacientes encontram-se em situações cirúrgicas, de retenção urinária, baixa mobilidade ou apenas necessidade de controle hídrico diário. Reduzindo o risco de contaminação através de seu sistema fechado.

#### **EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:**

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa de transporte 100 unidades.

**ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

#### **ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Feche a válvula de saída da bolsa coletora;
- Remova a tampa de proteção do conector adaptador e introduza ao cateter previamente preparado;
- A urina fluirá para dentro da bolsa através do cateter urinário;
- Para esvaziar a bolsa, retirar o tubo de drenagem do encaixe e posicione a um recipiente adequado que receberá a urina, em seguida abra a saída da válvula para drenagem;
- Após o esvaziamento, fechar a válvula e recolocar no encaixe.
- O dispositivo apresenta ponto de coleta de urina com membrana autocicatrizante para inserção da agulha.

#### **PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

#### **CONTRAINDICAÇÕES:**

O coletor de urina de sistema fechado apresenta contraindicações a serem observadas. Não é adequado para pacientes alérgicos aos materiais do coletor, com obstrução urinária, necessitando de monitoramento rigoroso da diurese, com infecções urinárias graves, ou em situações em que o sistema fechado possa ser danificado. Em tais casos, é essencial considerar alternativas apropriadas.



**Ficha Técnica**  
**Coletor de Urina Sistema**  
**Fechado - GLOMED**

REG. Nº.: 220-01  
RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
SIMARA COLOMBI BUSCH  
COREN/SC 273.138

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

SIMARA COLOMBI BUSCH  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138