




Ficha Técnica Scalp Descartável GLOMED

REG. Nº.: 221-06
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: SCALPES

NOME COMERCIAL: SCALP DESCARTÁVEL - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273459027

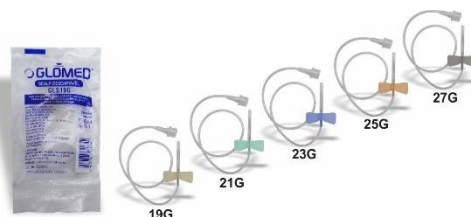

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD.

39 South Shengli Road, Jinxian County, 331700 Nanchang, Jiangxi Province, people's republic of China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Scalp descartável– GLOMED é composto por uma agulha siliconizada em aço inoxidável com diâmetro e comprimento variado, bisel curto e trifacetado, a agulha é revestida por uma capa protetora em polietileno, possui asas em PVC as quais são flexíveis e coloridas de acordo com a Norma 9753, o dispositivo apresenta tubo de PVC transparente medindo 30cm, o qual faz a ligação da agulha ao conector luer lock.

MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	TAM	COMP. AGULHA	CALIBRE AGULHA	COLORAÇÃO DA ASA	EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES	EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
GLS19G	19Gx19	¾" (19mm)	19G (1,10 mm)	CREME	01	X	2.000
GLS21G	21Gx19	¾" (19mm)	21G (0,80 mm)	VERDE	01	X	2.000
GLS23G	23Gx19	¾" (19mm)	23G (0,60 mm)	AZUL	01	X	2.000
GLS25G	25Gx19	¾" (19mm)	25G (0,50 mm)	LARANJA	01	X	2.000
GLS27G	27Gx19	¾" (19mm)	27G (0,40 mm)	CINZA	01	X	2.000

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

Ficha Técnica

Scalp Descartável


GLOMED

REG. Nº.: 221-06
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES DA CAIXA

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS UNITÁRIO	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
19G	7,40	0,37	0,27	0,55	0602883920842	10602883920849	20602883920846
21G	7,40	0,37	0,27	0,55	0606529140694	10606529140691	20606529140698
23G	7,40	0,37	0,27	0,55	0606529140700	10606529140707	20606529140704
25G	7,40	0,37	0,27	0,55	0606529140717	10606529140714	20606529140711
27G	7,40	0,37	0,27	0,55	0606529140724	10606529140721	20606529140728

IMAGEM GRÁFICA:

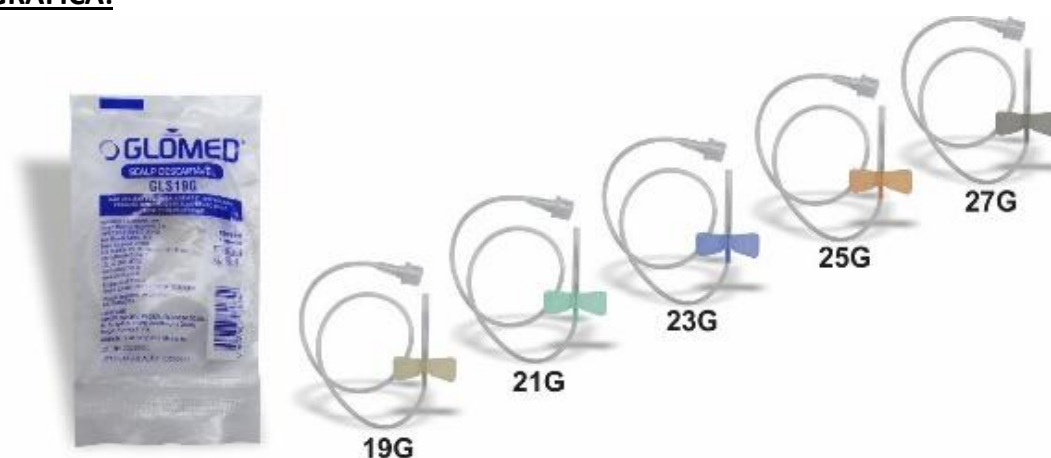

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para introduzir soluções parenterais, de curta duração, com permanência de até 24 horas na veia, é utilizado também para procedimentos de coleta de sangue.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Embalado individualmente em filme plástico transparente, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa comercial com 100 unidades; Caixa de transporte 2.000 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto;
- Selecione o calibre apropriado de acordo com as necessidades clínicas do paciente;
- Garroteie o local a ser puncionado, aproximadamente de 5 a 10 cm do local da punção venosa, a fim de propiciar a dilatação da veia;



Ficha Técnica Scalp Descartável GLOMED

REG. Nº.: 221-06
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

- Realize a assepsia do local escolhido, usando PVPI alcoólico ou álcool a 70%, partindo da porção distal do braço ou de baixo para cima, sempre no mesmo sentido;
 - Com o bisel voltado para cima introduza o scalp na pele, quando observado a presença de retorno venoso, desgarrotear o braço do paciente;
 - Retire a tampa de trava rosqueada, ligue a conexão ao equipo imediatamente após a retirada da proteção. Caso o procedimento seja para coleta de sangue, conectar a seringa e aspirar o sangue;
 - Fixar o scalp na pele do paciente, deixando livre o local de conexão;
- Descarte o produto após sua utilização

Nota: A tampa protetora do orifício de injeção deve permanecer fechada quando não estiver sendo utilizada.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo em temperatura ambiente.

CONTRAINDICAÇÕES:

Scalp descartáveis sem sistemas de segurança não são indicados em procedimentos de punção que requerem prevenção de acidentes com agulhas. Pacientes que necessitam de punções frequentes devem optar por alternativas com sistemas de segurança. É essencial escolher dispositivos com sistemas de segurança apropriados para garantir a segurança de pacientes e profissionais de saúde

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138