



Ficha Técnica

Equipo Enteral Descartável- GLOMED

REG. Nº.:238-03

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: EQUIPOS

NOME COMERCIAL: EQUIPO ENTERAL DESCARTÁVEL – GLOMED.

REGISTRO ANVISA: 80273459029



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD.

39 South Shengli Road, Jinxian County, 331700 Nanchang, Jiangxi Province, people's republic of China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Equipo para nutrição enteral é um dispositivo confeccionado em PVC flexível, possui câmara gotejadora flexível Macrogotas (20 gotas = 1ml) – (50 milímetros comprimento da câmara) com respiro de ar e filtro bacteriológico, regulador de fluxo tipo pinça rolete, tubo azul de 150 cm, ponta distal escalonada específica para frascos de nutrição enteral.

MODELO	PONTA PERFURANTE COM TAMPA	RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLÓGICO	CÂMERA GOTEJADORA	FILTRO DE PARTÍCULAS	TUBO FLEXÍVEL PVC	PINÇA ROLETE	PINÇA CLAMP	INJETOR LATERAL EM Y	CONECTOR
GL 1 E	Presente	Presente	Macrogotas	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Graduado
GL 2 E	Presente	Presente	Macrogotas	Ausente	Presente	Presente	Ausente	Ausente	Slip

MODELOS DISPONÍVEIS:

PRODUTO	PONTA/CONEXÃO	EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES	EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
EQUIPO ENTERAL GL1E	ESCALONADO	01	25	400
EQUIPO ENTERAL GL2E	SLIP	01	25	500

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

Ficha Técnica

Equipo Enteral Descartável- GLOMED



REG. Nº.:238-03

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	MODELO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITARIA	COD. BARRAS CAIXA EMBARQUE
EQUIPO ENTERAL GL1E	ESCALONADO	9,50	0,355	0,35	0,585	0602883920392	20602883920396
EQUIPO ENTERAL GL2E	SLIP	12,00	0,38	0,38	0,61	0618341483620	20618341483624

IMAGEM GRÁFICA:

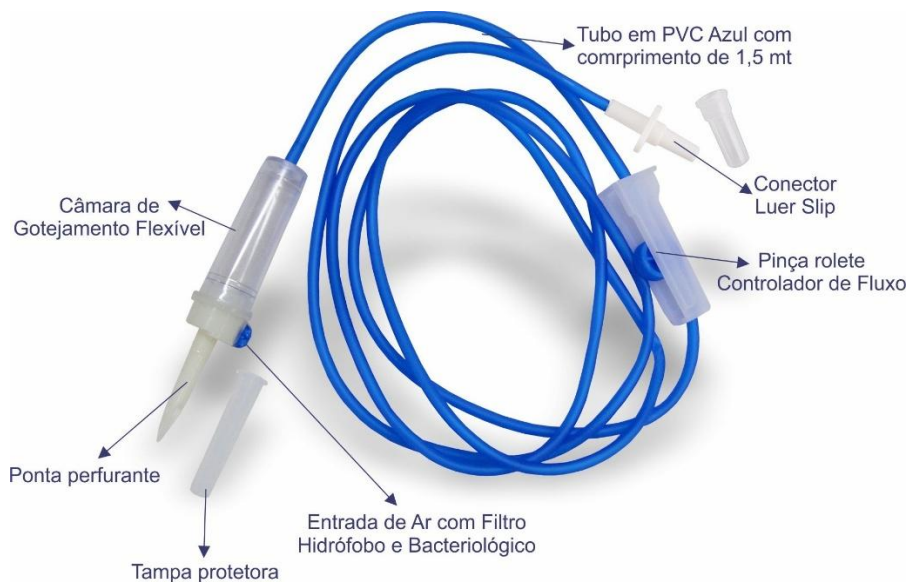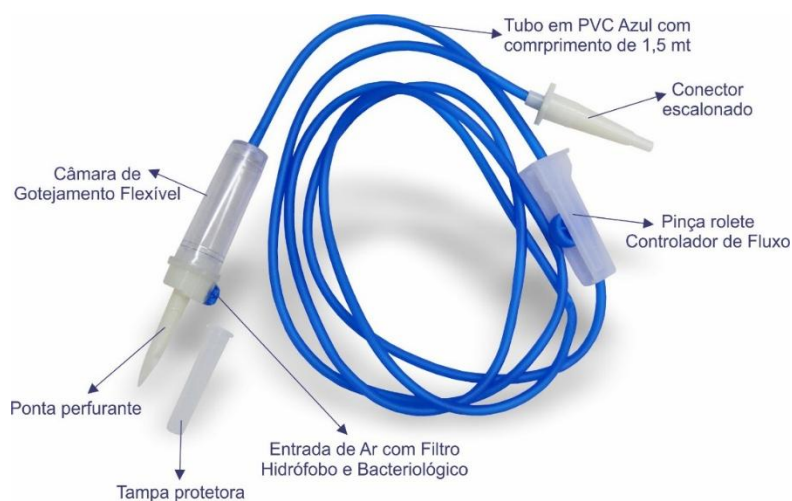



Ficha Técnica

Equipo Enteral Descartável- GLOMED

REG. Nº.:238-03

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH

COREN/SC 273.138

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Dispositivo para administração de solução enteral por gravidade, indicado para ingestão de alimentos líquidos ou semilíquidos, através de sonda posicionada ou implantada no estômago ou intestino delgado, permitindo o controle e dosagem do fluxo.

EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:

Embalado individualmente com embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa de transporte com de 400 a 500 unidades;

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Feche a pinça rolete;
- Remova a tampa protetora da ponta perfurante e conecte ao frasco de solução;
- Suspenda o frasco no suporte e realize uma leve pressão com os dedos no corpo da câmera, preenchendo $\pm 30\%$ de sua capacidade;
- Abra a pinça rolete, até que a solução preencha o tubo flexível azul;
- Feche a pinça rolete e retire a tampa protetora do conector graduado, em seguida introduza o conector graduado na sonda instalada no paciente;
- Abra a pinça rolete e regule o fluxo de gotejamento conforme prescrição médica.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilizar nem reutilizar, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

CONTRAINDICAÇÕES:

O equipo de nutrição enteral tem contraindicações importantes. É desaconselhado para pacientes com alergia aos materiais, obstrução gastrointestinal, distúrbios de absorção intestinal graves, ou em situações em que a nutrição enteral não seja clinicamente indicada. Pacientes com necessidades específicas ou que requerem nutrição parenteral devem considerar alternativas apropriadas. É essencial seguir essas diretrizes para garantir o uso adequado do equipo de nutrição enteral

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366



Ficha Técnica
Equipo Enteral Descartável-
GLOMED

REG. Nº.:238-03

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH

RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138