

NOME TÉCNICO: Tampa Seladora Luer

NOME COMERCIAL: Tampa Seladora – GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450058



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

NEX MEDICAL CO., LTD.

Shuanglian Road – Kechuang Industrial Park – Haichang District – Haining – Jiaxing – Zhejiang – China – 314400

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A Tampa Oclusora - GLOMED é confeccionada em **Polipropileno (PP) e Polietileno (PE)** por meio de moldagem por injeção. Esse produto foi projetado para se adaptar de forma precisa ao dispositivo venoso e seus acessórios, garantindo a oclusão e proteção contra a entrada de possíveis contaminantes microbiológicos, além de vedar o fluxo de líquidos, evitando riscos de contaminação. Livre de látex.

MODELOS DISPONÍVEIS:

CODIGO INTERNO	MODELO	TAMPA OCLUSORA	CONEXÃO	TAMANHO	MATERIA PRIMA
115210	GLTO/S	LUER SLIP	MACHO	9.15x8.30 mm	Polietileno (PE)
115211	GLTO/L	LUER LOCK	FÊMEA	6.00x18.60 mm	Polietileno (PE)
115212	GLTO/SL	LUER SLIP/LOCK	MACHO/ FÊMEA	10.80x19.05 mm	Polipropileno (PP)

LUER SLIP: Compatível com dispositivos de bico liso (conexão macho), como equipos gravitacionais, equipos multivias, seringas e outros dispositivos com conexão Luer Slip.

LUER LOCK: Compatível com dispositivos de bico Lock (conexão fêmea), como cateteres, escalpes, torneiras 3 vias e outros acessórios com conexão Luer Lock.

LUER SLIP / LOCK: Compatível com dispositivos de bico liso e de bico Lock (conexões macho e fêmea), oferecendo flexibilidade na conexão.

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS ENVELOPE UN	COD. BARRAS PACOTE COM 100UN	COD. BARRAS TRANSPORTE CX 9600 UN
GLTO/S					0074468946149	10074468946146	20074468946143
GLTO/L					0074468946170	10074468946177	20074468946174
GLTO/SL					0074468946200	10074468946207	20074468946204

IMAGEM GRÁFICA:

CONEXÃO		
		
LUER SLIP – MACHO (PE)	LUER LOCK – FÊMEA (PE)	LUER SLIP/LOCK - MACHO/ FÊMEA (PP)

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

A Tampa Oclusora GLOMED é indicada para vedação de conexões em dispositivos médicos, como equipos de infusão, seringas, cateteres e escalpes, sendo utilizada para impedir o fluxo de líquidos e proteger contra contaminações externas, especialmente após a administração de medicamentos, seja em seringas pré-preenchidas ou manipuladas, tanto para infusão contínua quanto para aplicações imediatas ou intermitentes.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO

O produto é disponibilizado individualmente. Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente e/ ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022

ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade da embalagem e a validade do produto.
- Abrir a embalagem da Tampa de forma asséptica.
- Instale a tampa oclusora em dispositivos médicos com conexão Luer, encaixando-a até o limite de vedação total.
- Certifique-se de que a conexão está corretamente ajustada e vedada.
- Após o uso descarte o produto em local adequado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize e nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não Aplicável

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138