



FICHA TÉCNICA
Lençol Descartável Com Elástico
GLOMED

REG. Nº.: 207-01
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: ROUPA DE CAMA HOSPITALAR

NOME COMERCIAL: LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - GLOMED

NOTIFICAÇÃO ANVISA: Produto não passível de regularização junto à GGTPS, de acordo com o enquadramento este produto é definido como não médico, conforme estabelecido pela Resolução RDC 751/2022.

DETENTOR DO REGISTRO:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br



RESPONSÁVEL TÉCNICA :

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE :

GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD

Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O lençol descartável é confeccionado em tecido não tecido 100% Polipropileno. Possui elástico nas extremidades para facilitar o ajuste. Cor branca. Não estéril. O produto é livre de látex.

MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	MODELO	TAMANHO	COR
92019	ELÁSTICO	2.00 X 0.90	BRANCA

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS COMERCIAL PCT C/ 10 UND	CÓDIGO DE BARRAS TRANSPORTE 30 PCT C/ 10 UND = 300
LENÇOL	10,40	0,300	0,520	0,500	0606529141165	0606529141172

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para proteção de macas, camas e diferentes superfícies. Oferecendo proteção e segurança durante os procedimentos.

EMBALAGEM:

Produto embalado em pacote plástico contendo 100 unidades, rotulagem conforme RDC 751/2022. As embalagens comerciais são acondicionadas em caixas de transporte 300 unidades.

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir o pacote com as mãos limpas e secas e retirar o lençol a ser utilizado de sua embalagem original;
- Ajustar o elástico das laterais do lençol no colchão, divã, cama ou maca;
- Após procedimento no qual foi utilizado o lençol, o mesmo deverá ser descartado;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reutilize, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÃO:

O lençol descartável em TNT não estéril é uma opção prática, mas tem contraindicações a serem observadas. Não é adequado para procedimentos cirúrgicos ou ambientes que exigem alta esterilização, e não deve ser usado por pacientes alérgicos aos materiais. Também não é recomendado para uso prolongado em situações que necessitam de propriedades antibacterianas e não é indicado em ambientes que requerem controle rigoroso de micro-organismos, como unidades de terapia intensiva. É fundamental considerar essas contraindicações ao escolher o lençol adequado para garantir um ambiente de cuidados de saúde seguro.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35° C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138