

NOME TÉCNICO: MÁSCARAS
NOME COMERCIAL: MÁSCARA DESCARTÁVEL OLIMED
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450010
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO



DETENTOR DO REGISTRO:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO., LTD
Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A Máscara cirúrgica descartável - OLIMED Confeccionada em TNT 100% polipropileno, com três camadas (duas de TNT e uma de filtro Melt Blown – BFE ≥ 95%). Clipe nasal em arame metálico revestido em plástico. Fixação por tiras em TNT ou elástico em material sintético (poliéster e elastano). Produto atóxico, hipoalergênico não estéril. Disponível na cor **BRANCA, PRETA e ROSA.**


MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	MODELO	COR	EMBALAGEM
54467	ELÁSTICO	BRANCA	CAIXA
69003	ELÁSTICO	BRANCA	PACOTE
113626	ELÁSTICO	PRETA	CAIXA
113610	TIRAS	ROSA	CAIXA
69010	TIRAS	BRANCA	PACOTE

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS COMERCIAL CX C/ 50 UND	COD. BARRAS TRANSPORTE	
ELÁSTICO	6,20	0,390	0,300	0,520	0606529141196	20606529141190	40 CX C/ 50 UND
ELÁSTICO	11,10	0,380	0,490	0,500	0606529141097	20606529141091	100 PCT C/ 50 UND
ELÁSTICO	6,20	0,390	0,300	0,520	0602883920569	X	40 CX C/ 50 UND
TIRAS	6,40	0,390	0,300	0,520	0602883920545	20602883920549	40 CX C/ 50 UND
TIRAS	14,90	0,380	0,570	0,500	0606529141110	X	80 PCT C/ 50 UND

IMAGEM GRÁFICA:

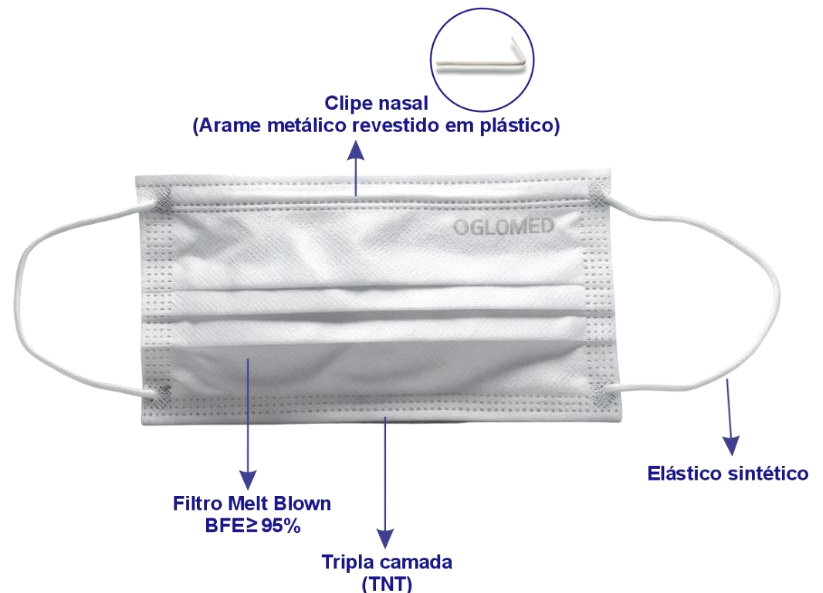

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea e projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias.

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em plástico ou caixa de papelão, rotulagem conforme RDC 751/2022. Embalagem comercial contém 50 unidades. Caixas de transporte possuem as seguintes configurações: máscaras com tiras em pacote 80 pacotes por caixa; máscaras com elástico em pacote 100 pacotes por caixa; máscaras com elástico em caixa 40 caixas por caixa de transporte.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abra a caixa/pacote e retire a máscara;
- Faça o manuseio pelas alças/tiras com as mãos higienizadas;
- Posicione as dobras para baixo no lado de fora da máscara e as dobras para cima para o lado de dentro da máscara;
- Certifique-se que a máscara esta rente ao rosto, cobrindo nariz e a boca;
- Prenda a máscara atrás das orelhas seja com elástico ou amarrando atrás da cabeça com as tiras;
- Ajuste o clipe nasal ao contorno do nariz;
- Evite tocar na parte da frente quando estiver colocando-a;
- Não usar por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida;
- Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras;
- Após utilização, descartar em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, despreze o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- O uso deve ser individual;
- Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar higienize suas mãos;
- Se precisar mexer ou ajustar a máscara, fazer pelo elástico ou amarração;
- Não é recomendado o uso da mesma máscara por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida por outra limpa e seca;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

Máscaras descartáveis – GLOMED não são adequadas para indivíduos com dificuldades respiratórias ou que necessitem de assistência para remover a máscara. Também não são recomendadas para crianças muito pequenas, pessoas alérgicas aos materiais da máscara e em situações que demandem uma máscara com classificação específica de filtração ou proteção. Além disso, seu uso prolongado pode causar desconforto e irritação na pele. Considerar essas contraindicações é crucial para garantir a segurança e eficácia na proteção respiratória.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138