

NOME TÉCNICO: MÁSCARA FACIAL CIRÚRGICA
NOME COMERCIAL: MÁSCARA DESCARTÁVEL - GLOMED
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450047
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO



DETENTOR DO REGISTRO:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA :
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE :
GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO., LTD
Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P: R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Confeccionada em TNT 100% polipropileno, com três camadas (duas de TNT e uma de filtro Melt Blown – BFE ≥ 95%). Clipe nasal em arame metálico revestido em plástico. Fixação por tiras em TNT ou elástico em material sintético (poliéster e elastano). Produto atóxico e hipoalergênico. Disponível na cor **BRANCA, PRETA, ROSA**. Com opções em **Elástico** ou em **Tiras**.


MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	MODELO	COR	LARG. FECHADA	LARG. ABERTA	COMP. MÁSCARA	COMP. TIRAS X ELÁSTICO	CLIP NASAL	G/M ² TRÊS CAMADAS DE 20G	
54467	ELÁSTICO	CX	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	40,0 cm	10,0 cm	60g
69003	ELÁSTICO	PCT	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g
113626	ELÁSTICO	CX	PRETA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g
113610	ELÁSTICO	CX	ROSA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g
69010	TIRAS	PCT	BRANCA	5,0 cm	9,5 cm	7,5 cm	7,0 cm	10,0 cm	60g

DIMENSÕES DA CAIXA

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS COMERCIAL CX C/ 50 UND	COD. BARRAS TRANSPORTE	
ELÁSTICO	6,20	0,390	0,300	0,520	0606529141196	20606529141190	40 CX C/ 50 UND
ELÁSTICO	11,10	0,380	0,490	0,500	0606529141097	20606529141091	100 PCT C/ 50 UND
ELÁSTICO	6,20	0,390	0,300	0,520	0602883920569	X	40 CX C/ 50 UND
ELÁSTICO	6,40	0,390	0,300	0,520	0602883920545	20602883920549	40 CX C/ 50 UND
TIRAS	14,90	0,380	0,570	0,500	0606529141110	X	80 PCT C/ 50 UND

IMAGEM GRÁFICA

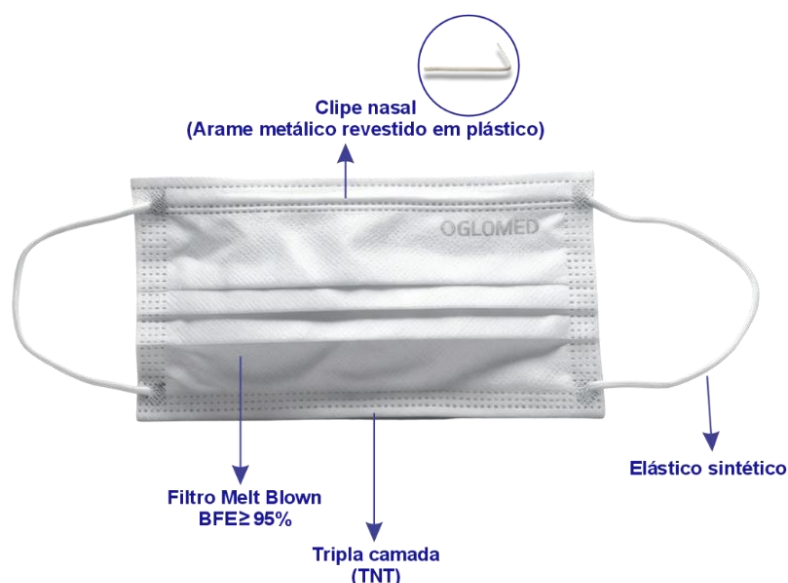

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea e projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias.

EMBALAGEM:

Embalado em pacote plástico ou caixa de papelão, rotulagem conforme RDC 751/2022. Embalagem comercial contém 50 unidades. Caixas de transporte possuem as seguintes configurações: máscaras com tiras em pacote – 80 pacotes por caixa; máscaras com elástico em pacote – 100 pacotes por caixa; máscaras com elástico em caixa – 40 caixas por caixa de transporte.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abra a caixa/pacote e retire a máscara;
- Faça o manuseio pelas alças/tiras com as mãos higienizadas;
- Posicione as dobras para baixo no lado de fora da máscara e as dobras para cima para o lado de dentro da máscara;
- Certifique-se que a máscara esta rente ao rosto, cobrindo nariz e a boca;
- Prenda a máscara atrás das orelhas seja com elástico ou amarrando atrás da cabeça com as tiras;
- Ajuste o clipe nasal ao contorno do nariz;
- Evite tocar na parte da frente quando estiver colocando-a;
- Não usar por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida;
- Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto a contaminação;
- O uso deve ser individual;
- Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar higienize suas mãos;
- Se precisar mexer ou ajustar a máscara, fazer pelo elástico ou amarração;
- Não é recomendado o uso da mesma máscara por mais de 4 horas, trocar sempre que estiver úmida por outra limpa e seca;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018)
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

Máscaras descartáveis são contraindicadas para indivíduos com dificuldades respiratórias ou que necessitem de assistência para remover a máscara. Também não são recomendadas para crianças muito pequenas, pessoas alérgicas aos materiais da máscara e em situações que demandem uma máscara com classificação específica de filtração ou proteção. Além disso, seu uso prolongado pode causar desconforto e irritação na pele. Considerar essas contraindicações é crucial para garantir a segurança e eficácia na proteção respiratória.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138