

**NOME TÉCNICO:** BOLSAS COLETORAS

**NOME COMERCIAL:** COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO SEM FILTRO - GLOMED

**NOTIFICAÇÃO ANVISA:** 80273450050

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:** I - BAIXO RISCO



**DETENTOR DO REGISTRO:**

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480/ [sac@olimed.com.br](mailto:sac@olimed.com.br)

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**

**WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD.**

712. ARUNACHAL BUILDING, 19 BARAKHAMBHA ROAD, NEW DELHI- 110001 INDIA

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

O coletor de urina sistema fechado sem filtro – GLOMED é composto de um tubo 100cm de PVC ligado a bolsa coletora em PVC graduada, com capacidade de 500 a 2000ml e válvula antirrefluxo de PVC na parte inferior, dependendo do modelo pode apresentar configurações diferentes. O produto é livre de látex.


**MODELOS DISPONÍVEIS:**

COD. INTERNO	MODELO	CAPACIDADE	COMPRIMENTO DO TUBO	PONTO DE COLETA	VÁLVULA ANT-REFLUXO	MATERIAL
100381	SEM FILTRO	500 a 2000 ML	100 cm	APRESENTA	APRESENTA	PVC

**DIMENSÕES DAS CAIXAS:**

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS UNITÁRIA	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS TRANSPORTE CX 100 UNDS
SEM FILTRO	10,30	0,370	0,350	0,540	0606529140588	x	20606529140582

**IMAGEM GRÁFICA:**

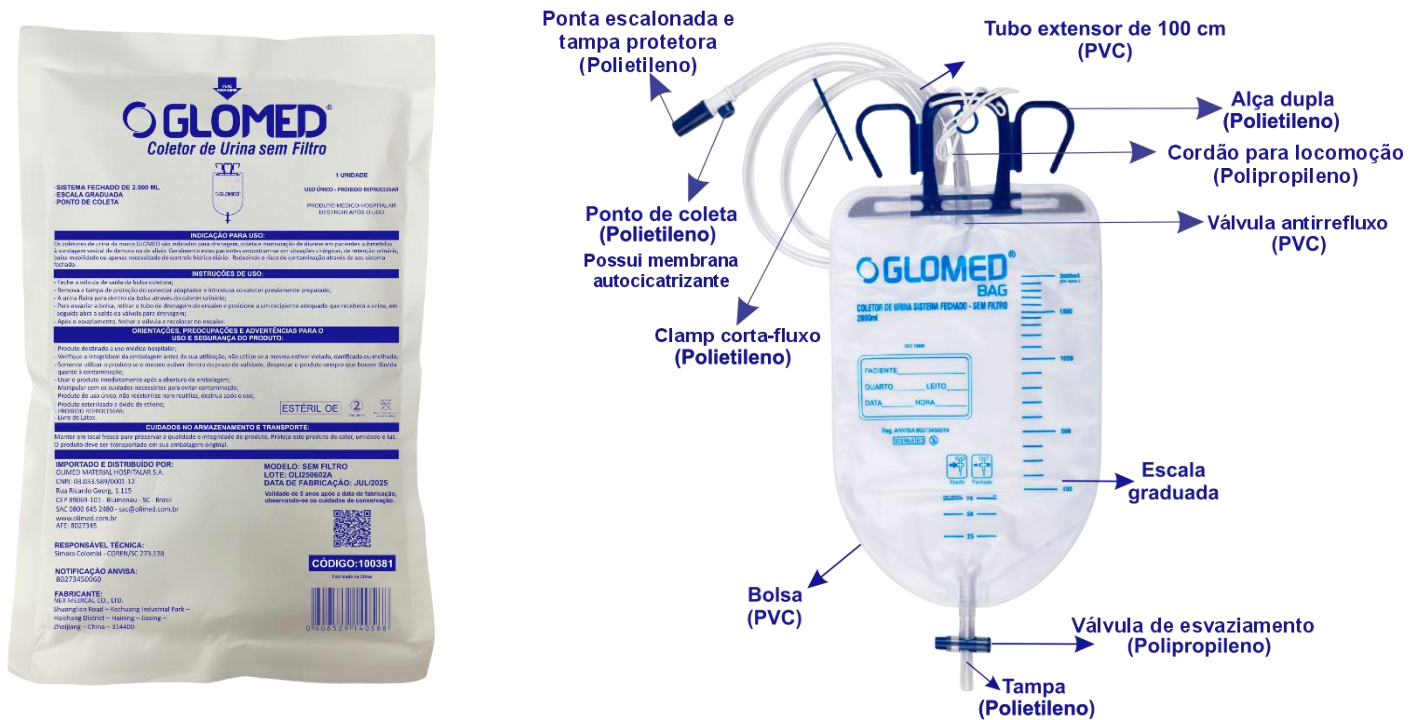

**INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

É indicado para drenagem, coleta e mensuração de diurese em pacientes submetidos à sondagem vesical de demora ou de alívio. Geralmente estes pacientes encontram-se em situações cirúrgicas, de retenção urinária, baixa mobilidade ou apenas necessidade de controle hídrico diário. Reduzindo o risco de contaminação através de seu sistema fechado.

**EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:**

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente (polietileno/Poliamida) e/ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022. Cada embalagem contém 1(uma) unidade de coletor de urina e 1 (uma instrução de uso). As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de transporte contendo 100 unidades.

**ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Feche a válvula de saída da bolsa coletora;
- Remova a tampa de proteção do conector adaptador e introduza ao cateter previamente preparado;
- A urina fluirá para dentro da bolsa através do cateter urinário;
- Para esvaziar a bolsa, retirar o tubo de drenagem do encaixe e posicione a um recipiente adequado que receberá a urina, em seguida abra a saída da válvula para drenagem;
- Após o esvaziamento, fechar a válvula e recolocar no encaixe.
- O dispositivo apresenta ponto de coleta de urina com membrana autocicatrizante para inserção da agulha.
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/20180);
- Atóxico, Livre de Látex.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

O coletor de urina sistema fechado sem filtro é contraindicado para pacientes com alergia aos materiais que compõem o dispositivo, para aqueles com obstrução urinária, para pacientes que necessitem de monitoramento rigoroso e preciso da diurese, bem como em casos de infecções urinárias graves. Também deve ser evitado em situações em que exista risco de dano ou violação do sistema fechado. Nessas circunstâncias, é essencial considerar alternativas apropriadas.

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138