

NOME TÉCNICO: CATETERES

NOME COMERCIAL: CATETER INTRAVENOSO - GLOMED

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450027

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: II - MÉDIO RISCO



DETENTOR DO REGISTRO

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

DISPOSAFE HEALTH AND LIFE CARE LIMITED.

PLOT 1 & 2, PHASE – II , SECTOR-59, BALLABHGARH, FARIDABAD, HARYANA 121004, INDIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Cateter intravenoso – GLOMED é composto por uma cânula em Teflon, radiopaca, flexível. Agulha em aço inoxidável com diâmetro e comprimento variado, bisel trifacetado e parede finas. Canhão translúcido, colorido conforme os tamanhos da cânula.

Apresentam-se em diversos calibres, codificados por cor conforme padrão exigido em norma. Cada calibre corresponde às necessidades de cada paciente, tais como neonatais, pediátricos e adultos (quanto maior a numeração, menor o calibre). O produto é livre de látex.

MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	MODELO	TAMANHO	COR	VELOCIDADE DO FLUXO	DIAMETRO INTERNO	COMPRIMENTO
113922	GLC14G	14G	LARANJA	305	1,7 mm	45 mm
113939	GLC16G	16G	CINZA	200	1,3 mm	45 mm
113945	GLC18G	18G	VERDE	95	0,9 mm	45 mm
113951	GLC20G	20G	ROSA	65	0,8 mm	32 mm
113968	GLC22G	22G	AZUL	36	0,6 mm	25 mm
113974	GLC24G	24G	AMARELO	23	0,5 mm	19 mm

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS UNITÁRIA	COD. DE BARRAS COMERCIAL CX C/ 100 UND	COD. DE BARRAS TRANSPORTE 10 CX C/ 100 UND = 1.000
CATETER 14G	6,10	0,290	0,190	0,540	0606529140946	10606529140943	20606529140940
CATETER 16G	6,00	0,290	0,190	0,540	0606529140953	10606529140950	20606529140957
CATETER 18G	5,60	0,300	0,190	0,550	0606529140960	10606529140967	20606529140964
CATETER 20G	5,60	0,300	0,190	0,550	0606529140977	10606529140974	20606529140971
CATETER 22G	5,50	0,300	0,190	0,550	0606529140984	10606529140981	20606529140988
CATETER 24G	5,40	0,300	0,190	0,550	0606529140991	10606529140998	20606529140995

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

É indicado para introduzir soluções parenterais, de curta a média duração através da introdução do cateter no vaso sanguíneo periférico.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente (polietileno/Poliamida) e/ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; as embalagens individuais são acondicionadas em caixa comercial contendo 100 unidades e caixa de transporte 1.000 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto;
- Selecione o calibre apropriado de acordo com as necessidades clínicas do paciente;
- Abra a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Garroteie o local a ser puncionado, aproximadamente de 5 a 10 cm do local da punção venosa, a fim de propiciar a dilatação da veia;
- Realize a assepsia do local escolhido, usando PVPI alcoólico ou álcool a 70%, partindo da porção distal do braço ou de baixo para cima, sempre no mesmo sentido;
- Com o bisel voltado para cima introduza o cateter na pele, observado o retorno do sangue através do mandril; desgarrrotear o braço do paciente e retirar a agulha cuidadosamente;
- Descarte a agulha em um coletor perfurocortante;
- Conecte o cateter a um equipo de infusão;
- Realize a fixação na pele do paciente, deixando livre o local de conexão;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

O cateter intravenoso não é recomendado para tratamentos intravenosos de longa duração, pacientes com histórico de alergias, procedimentos que exigem alta segurança e prevenção de infecções, ou para pacientes com veias frágeis, devido ao risco aumentado de complicações e menor segurança. Também não deve ser utilizado em casos de hiperemia, flebite, edema, escoriações, queimaduras ou fraturas no local a ser puncionado.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C, para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Evite calor excessivo e proteja o produto da luz solar direta. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138