

**NOME TÉCNICO:** EXTENSOR

**NOME COMERCIAL:** INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP VALVULADO - GLOMED

**NOTIFICAÇÃO ANVISA:** 80273459014

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:** II – MÉDIO RISCO

**DETENTOR DO REGISTRO:**

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br



**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**

**ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO. LTD.**

No. 8 Tianfeng Road, Yongfeng Industry Area, Tianchang City, Anhui, China

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

O infusor multivias com clamp valvulado – GLOMED é um dispositivo estéril confeccionado em Policloreto de Vinila-PVC Atóxico; Tubo flexível transparente de 15 a 25 cm com derivação em Y. Possui tampa luer lock em seu ramo proximal e em seus ramos distais conectores valvulados em silicone para luer lock e luer slip, suas pontas apresentam clamp corta fluxo com cores diferenciadas para auxiliar na identificação da via. O produto é livre de látex.

**MODELOS DISPONÍVEIS:**

CÓDIGO INTERNO	MODELO	CONEXÃO	EXTENSÃO TOTAL DO TUBO	VIA DO INFUSOR	TAMANHO
114956	GL-IN2V-VAL/L	VALVULADO	15 – 25cm	2 VIAS	ADULTO/INFANTIL

**DIMENSÕES DAS CAIXAS:**

MODELO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA - PCT C/ 25 UNDS	COD. BARRAS EMBALAGEM COMERCIAL	COD. BARRAS TRANSPORTE 20 PCT C/ 25 UND = 500
GL-IN2V-VAL/L	7,60	0,380	0,350	0,580	0602883921153	X	20602883921157



**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem;
- Remover a tampa de proteção do conector;
- Conectar o equipo multivias a solução a ser infundida;
- Retirar o ar do sistema utilizando a solução, em seguida feche os clamps das vias;
- Proceder com punção venenosa conforme técnica (scalp ou cateter);
- Retirar a tampa do conector e encaixar no dispositivo intravenoso;
- Abrir os clamps conforme necessário;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilizar nem reutilizar, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018)
- Atóxico, Livre de Látex.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

O infusor multivias valvulado é contraindicado para pacientes com alergia aos materiais do dispositivo, para terapias que necessitam somente uma via de infusão, em casos com histórico de obstrução das vias, em situações que exigem infusões de baixo volume ou quando não há necessidade de administrar múltiplos medicamentos ou soluções simultaneamente. Nesses casos, recomenda-se a utilização de dispositivos mais adequados ao tipo de terapia prescrita e às condições clínicas do paciente.

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138