

**NOME TÉCNICO:** EQUIPOS

**NOME COMERCIAL:** EQUIPO CONEXÃO MULTIVIAS COM CLAMP PARA INFUSÃO INTRAVENOSA - GLOMED

**NOTIFICAÇÃO ANVISA:** 80273459028

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:** II – MÉDIO RISCO

**DETENTOR DO REGISTRO:**

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480 / [sac@olimed.com.br](mailto:sac@olimed.com.br)



**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**

**JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD.**

39 South Shengli Road, Jinxian County, 331700 Nanchang, Jiangxi Province, people's republic of China

### DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Equipo conexão multivias com clamp para infusão intravenosa - GLOMED é um dispositivo estéril confeccionado em Policloreto de Vinila - PVC Atóxico; Tubo flexível transparente de 15 a 25 cm com derivação em Y. Possui tampa luer lock em seu ramo proximal e em seus ramos distais conexão para luer lock e luer slip com protetor, suas pontas apresentam clamp corta fluxo com cores diferenciadas para auxiliar na identificação da via. O produto é livre de látex.


### MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	MODELO	CONEXÃO	EXTENSÃO TOTAL DO TUBO	VIA DO INFUSOR	TAMANHO
113900	GL-IN2V	SLIP	15 – 25cm	2 VIAS	ADULTO/INFANTIL

### DIMENSÕES DAS CAIXAS:

MODELO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA - PCT C/ 50 UNDS	COD. BARRAS EMBALAGEM COMERCIAL	COD. BARRAS TRANSPORTE 20 PCT C/ 50 UND = 500
GL-IN2V	4,70	0,390	0,320	0,400	0602883920415	X	20602883920419

**IMAGEM GRÁFICA:**

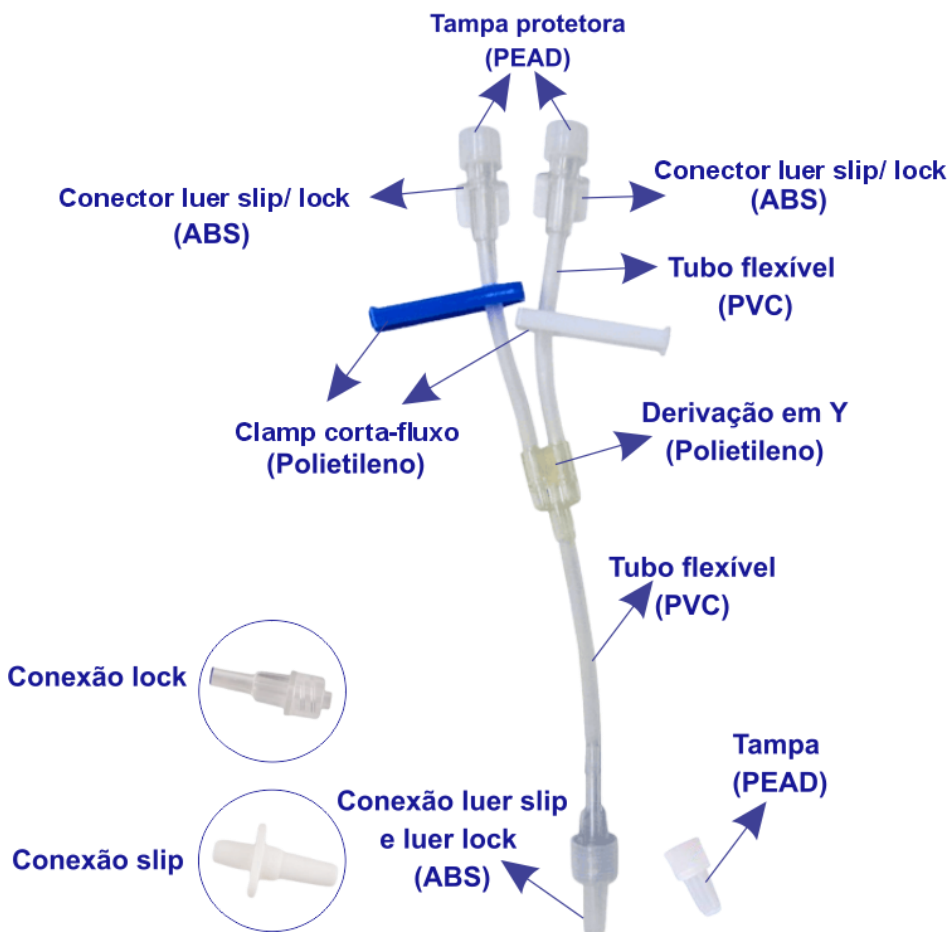

**INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

É indicado para multiplicar o acesso venoso, permitindo a conexão de duas vias de infusão (como equipos e extensores) a um único acesso venoso existente, incluindo scalp, cateter ou agulha. O produto possibilita a administração simultânea ou alternada de soluções intravenosas, de acordo com a prescrição e técnica do profissional de saúde.

**EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:**

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente e/ ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; cada embalagem contém 1equipo conexão e 1 instrução de uso. As embalagens individuais são acondicionadas em caixa de transporte contendo 500 unidades.

**ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem;
- Remover a tampa de proteção do conector;
- Conectar o equipo multivias a solução a ser infundida;
- Retirar o ar do sistema utilizando a solução, em seguida feche os clamps das vias;
- Proceder com punção venenosa conforme técnica (scalp ou cateter);
- Retirar a tampa do conector e encaixar no dispositivo intravenoso;
- Abrir os clamps conforme necessário;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilizar nem reutilizar, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018)
- Atóxico, Livre de Látex.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

O equipo conexão multivias é contraindicado para pacientes com alergia aos materiais do dispositivo, para terapias que necessitam somente uma via de infusão, em casos com histórico de obstrução das vias, em situações que exigem infusões de baixo volume ou quando não há necessidade de administrar múltiplos medicamentos ou soluções simultaneamente. Nesses casos, recomenda-se a utilização de dispositivos mais adequados ao tipo de terapia prescrita e às condições clínicas do paciente.

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138