


**NOME TÉCNICO:** SONDAS  
**NOME COMERCIAL:** SONDA NASOGASTRICA - GLOMED  
**NOTIFICAÇÃO ANVISA:** 80273459013  
**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:** II - MÉDIO RISCO

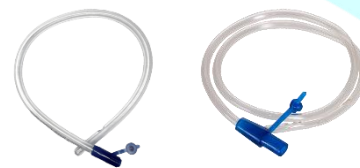

**DETENTOR DO REGISTRO:**  
**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**  
CNPJ: 03.033.589/0001-12  
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central  
Blumenau – SC – Brasil  
CEP 89069-101  
SAC 0800-645-2480 /[sac@olimed.com.br](mailto:sac@olimed.com.br)

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**  
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**  
**CHANGSHU SUPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.**  
Building 2, No.1 Taikang Road, industrial Park, North Region of Zhitang Town, Changshu City, 215531 Jiangsu, P.R. China

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A SONDA NASOGASTRICA – GLOMED é confeccionado em PVC (Cloro de Polivinila) atóxico, transparente de paredes finas e flexíveis nas opções Curta de 40 a 50 cm de comprimento e Longa de 100 a 120 cm de comprimento, com ponta arredonda e fechada, podendo apresentar 1 ou 2 orifícios laterais. Na outra extremidade do tubo apresenta um conector padrão com ou sem tampa. O produto é livre de látex.

### MODELOS E VARIAÇÕES DISPONÍVEIS:

#### GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA

| CÓDIGO INTERNO | MODELO   | TAMANHO | COR         | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | COMPRIMENTO |
|----------------|----------|---------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 115497         | GLSN-C04 | 4FR     | CINZA       | 0.80             | 1.67 ± 0.10      | 40 A 50 CM  |
| 115498         | GLSN-C06 | 6FR     | VERDE CLARO | 1.05             | 2.00 ± 0.10      | 40 A 50 CM  |
| 115499         | GLSN-C08 | 8FR     | AZUL        | 1.50             | 2.70 ± 0.10      | 40 A 50 CM  |
| 115500         | GLSN-C10 | 10FR    | PRETO       | 2.00             | 3.33 ± 0.10      | 40 A 50 CM  |
| 115501         | GLSN-C12 | 12FR    | BRANCO      | 2.45             | 4.00 ± 0.15      | 40 A 50 CM  |
| 115502         | GLSN-C14 | 14FR    | VERDE       | 2.95             | 4.70 ± 0.20      | 40 A 50 CM  |
| 115503         | GLSN-C16 | 16FR    | LARANJA     | 3.40             | 5.30 ± 0.20      | 40 A 50 CM  |
| 115504         | GLSN-C18 | 18FR    | VERMELHO    | 3.90             | 6.00 ± 0.20      | 40 A 50 CM  |
| 115505         | GLSN-C20 | 20FR    | AMARELO     | 4.30             | 6.67 ± 0.20      | 40 A 50 CM  |
| 115506         | GLSN-C22 | 22FR    | ROXO        | 4.50             | 7.33 ± 0.20      | 40 A 50 CM  |
| 115507         | GLSN-C24 | 24FR    | AZUL ESCURO | 5.00             | 8.00 ± 0.20      | 40 A 50 CM  |

#### GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA

| CÓDIGO INTERNO | MODELO   | TAMANHO | COR         | DIÂMETRO INTERNO | DIÂMETRO EXTERNO | COMPRIMENTO  |
|----------------|----------|---------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 115508         | GLSN-L04 | 4FR     | CINZA       | 0.80             | 1.67 ± 0.10      | 100 A 120 CM |
| 115509         | GLSN-L06 | 6FR     | VERDE CLARO | 1.05             | 2.00 ± 0.10      | 100 A 120 CM |
| 115510         | GLSN-L08 | 8FR     | AZUL        | 1.50             | 2.70 ± 0.10      | 100 A 120 CM |
| 115511         | GLSN-L10 | 10FR    | PRETO       | 2.00             | 3.33 ± 0.10      | 100 A 120 CM |
| 115512         | GLSN-L12 | 12FR    | BRANCO      | 2.45             | 4.00 ± 0.15      | 100 A 120 CM |
| 115513         | GLSN-L14 | 14FR    | VERDE       | 2.95             | 4.70 ± 0.20      | 100 A 120 CM |
| 115514         | GLSN-L16 | 16FR    | LARANJA     | 3.40             | 5.30 ± 0.20      | 100 A 120 CM |
| 115515         | GLSN-L18 | 18FR    | VERMELHO    | 3.90             | 6.00 ± 0.20      | 100 A 120 CM |
| 115516         | GLSN-L20 | 20FR    | AMARELO     | 4.30             | 6.67 ± 0.20      | 100 A 120 CM |
| 115517         | GLSN-L22 | 22FR    | ROXO        | 4.50             | 7.33 ± 0.20      | 100 A 120 CM |
| 115518         | GLSN-L24 | 24FR    | AZUL ESCURO | 5.00             | 8.00 ± 0.20      | 100 A 120 CM |

## DIMENSÕES DA CAIXA

### GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA



| PRODUTO  | PESO | LARG | ALT  | COMP | COD BARRAS EMBALAGEM UN | COD BARRAS CX COMERCIAL | COD BARRAS TRANSPORTE |         |
|----------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| GLSN-C04 | 3,80 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484085           | X                       | 0618341483972         | 800 UND |
| GLSN-C06 | 4,10 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484092           | X                       | 0618341483989         | 800 UND |
| GLSN-C08 | 4,60 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484108           | X                       | 0618341483996         | 800 UND |
| GLSN-C10 | 5,20 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484115           | X                       | 0618341484009         | 800 UND |
| GLSN-C12 | 4,60 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484122           | X                       | 0618341484016         | 600 UND |
| GLSN-C14 | 5,20 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484139           | X                       | 0618341484023         | 600 UND |
| GLSN-C16 | 5,90 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484146           | X                       | 0618341484030         | 600 UND |
| GLSN-C18 | 4,90 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484153           | X                       | 0618341484047         | 400 UND |
| GLSN-C20 | 6,10 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484160           | X                       | 0618341484054         | 400 UND |
| GLSN-C22 | 6,60 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484177           | X                       | 0618341484061         | 400 UND |
| GLSN-C24 | 7,50 | 0,32 | 0,38 | 0,56 | 0618341484184           | X                       | 0618341484078         | 400 UND |

### GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA


| PRODUTO  | PESO | LARG | ALT  | COMP | COD BARRAS EMBALAGEM UN | COD BARRAS CX COMERCIAL | COD BARRAS CX EMBARQUE |         |
|----------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| GLSN-L04 | 4,60 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484306           | X                       | 0618341484191          | 600 UND |
| GLSN-L06 | 5,00 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484313           | X                       | 0618341484207          | 600 UND |
| GLSN-L08 | 6,10 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484320           | X                       | 0618341484214          | 600 UND |
| GLSN-L10 | 7,30 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484337           | X                       | 0618341484221          | 400 UND |
| GLSN-L12 | 6,10 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484344           | X                       | 0618341484238          | 400 UND |
| GLSN-L14 | 7,10 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484351           | X                       | 0618341484245          | 400 UND |
| GLSN-L16 | 8,30 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484368           | X                       | 0618341484252          | 400 UND |
| GLSN-L18 | 7,60 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484375           | X                       | 0618341484269          | 300 UND |
| GLSN-L20 | 9,40 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484382           | X                       | 0618341484276          | 300 UND |
| GLSN-L22 | 6,90 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484399           | X                       | 0618341484283          | 200 UND |
| GLSN-L24 | 8,00 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 0618341484405           | X                       | 0618341484290          | 200 UND |

**IMAGEM GRÁFICA:**

**GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA**

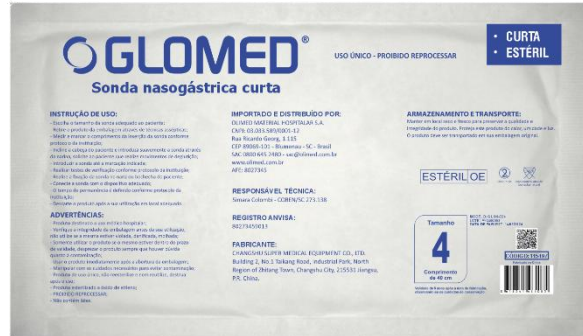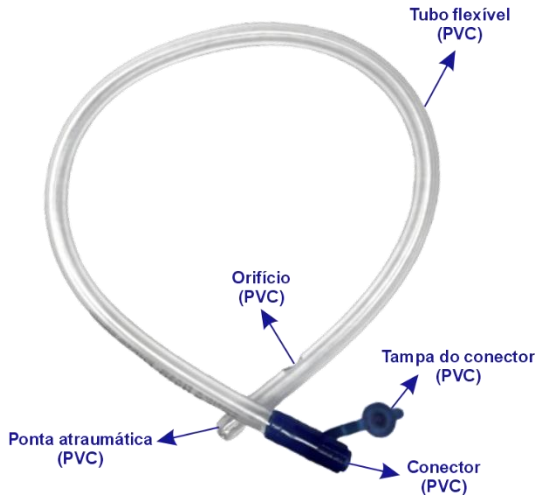

**GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA**

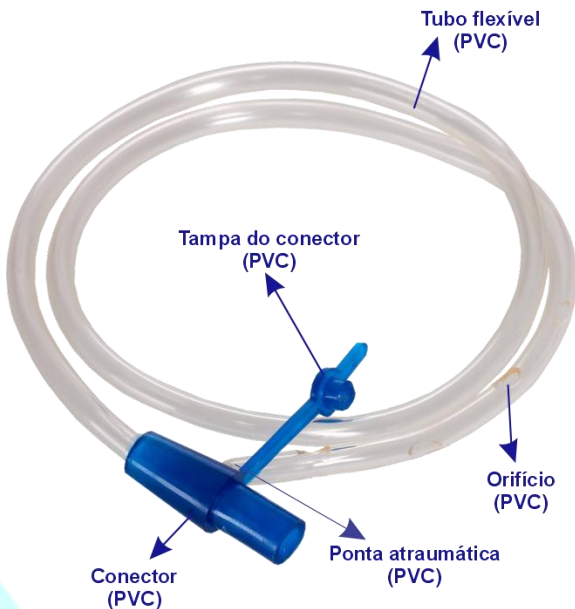

**INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

Indicada para administrar alimentos, medicamentos ou drenar conteúdo gástrico (estômago), é um dispositivo introduzido no estômago através do nariz ou da boca do paciente. Destina-se a utilização a pacientes incapazes de ingerir alimentos através da mastigação e deglutição normais.

**EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme plástico transparente e/ou embalagem plástica, com abertura asséptica e rotulagem conforme RDC 751/2022. Cada embalagem contém 1 dispositivo e 1 instrução de uso. As embalagens individuais são acondicionadas em caixa de transporte com 200 a 800 unidades, conforme configuração.

**ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Verifique a integridade da embalagem e validade do produto;
- Escolha o tamanho da sonda adequado ao paciente;
- Retire o produto da embalagem através de técnicas assépticas;
- Medir e marcar o comprimento da inserção da sonda conforme protocolo da instituição;
- Incline a cabeça do paciente e introduza suavemente a sonda através da narina, solicite ao paciente que realize movimentos de deglutição;
- Introduzir a sonda até a marcação indicada;
- Realizar testes de verificação conforme protocolo da instituição;
- Realize a fixação da sonda no nariz ou bochecha do paciente;
- Conecte a sonda com o dispositivo adequado;
- O tempo de permanência é definido conforme protocolo da instituição;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico. Livre de Látex.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

A sonda nasogástrica deve ser evitada em pacientes com obstrução nasal grave, histórico de sangramentos nasais recorrentes, fraturas de base de crânio ou lesões nasais, e em casos de dificuldades respiratórias graves. A inserção e manutenção da sonda devem ser realizadas por profissionais de saúde qualificados para garantir a segurança do paciente

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138