

NOME TÉCNICO: ESPARADRAPOS E FITAS ADESIVAS
NOME COMERCIAL: FITA ADESIVA PLÁSTICA - GLOMED
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450051
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO



DETENTOR DO REGISTRO:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA :
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE :
ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CP., LTD
No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Yongkang City, Zhejiang Province, China.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A Fita Adesiva plástica – GLOMED é transparente, confeccionada em polietileno (PE) micro perfurado, o que permite a passagem do ar e da umidade, ajudando na ventilação da pele. Sua camada adesiva é formulada com um adesivo acrílico hipoalergênico, projetado para oferecer aderência segura sem causar irritações cutâneas. A fita é acondicionada em carretel e capa de polietileno. O produto é livre de látex.


MODELOS DISPONÍVEIS

CÓDIGO INTERNO	MODELO	LARGURA	COMPRIMENTO
116724	GLPL25X10	2.5 cm	10 m
116725	GLPL50X10	5.0 cm	10 m
116726	GLPL100X4.5	10 cm	4,5m

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS TRANSPORTE	
GLPL25X10	4,100	0,345	0,140	0,235	0070341197561	0070341197554	08 PCT C/ 12 UND = 96
GLPL50X10	7,300	0,355	0,240	0,240	0070341197585	0070341197578	08 PCT C/ 12 UND = 96
GLPL100X4.5	2,300	0,345	0,115	0,235	0070341197608	0070341197592	02 PCT C/ 12 UND = 24

IMAGEM GRÁFICA:

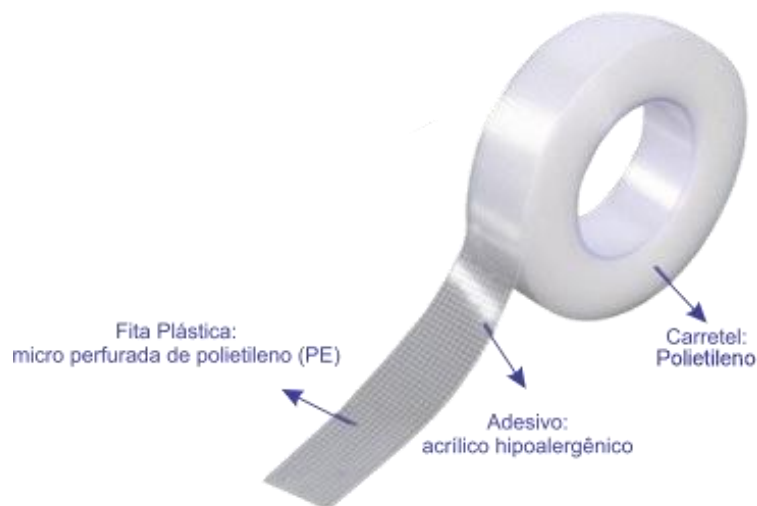

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

É indicada para fixação direta de curativos, bandagens e dispositivos médicos na pele, sobre ferimentos superficiais. Sua composição porosa possibilita a ventilação celular sem causar danos ou irritação. Devido à sua suavidade, é especialmente indicada para peles sensíveis, como as de crianças e idosos.

EMBALAGEM:

Produto acondicionado em carretel com capa de polietileno, devidamente rotulado conforme RDC 751/2022. Cada embalagem contém 1 Fita e 1 instrução de uso. As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de transporte contendo de 20 a 500 unidades.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto antes de usar;
- Selecione o tipo e o tamanho adequados da fita para cobrir a área desejada;
- Limpe a área removendo a umidade ou sujeira;
- Aplique a fita suavemente sobre a pele, evitando esticá-la;
- Fixe toda a fita, pressionando levemente do centro para as bordas, garantindo uma adesão uniforme.
- Para remoção da fita comece removendo pela borda da fita, puxando suavemente;
- Estabilize a pele com um dedo e remova a fita lentamente na direção do crescimento do pelo, para minimizar o desconforto;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto a contaminação.
- Evite esticar em excesso durante a aplicação para evitar desconforto.
- Não use em feridas abertas ou pele com erupções graves.
- Não utilize em pacientes alérgicos a adesivos médicos.
- Interrompa o uso se houver irritação na pele e consulte um profissional.
- Evite o uso prolongado em áreas sensíveis ou pacientes vulneráveis.
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico, Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÃO:

A fita adesiva plástica não é recomendada para pacientes com histórico de alergia a adesivos médicos ou a qualquer componente da fita. Caso ocorram sintomas como irritação, vermelhidão, coceira intensa ou qualquer outra reação adversa na pele após a aplicação da fita, é importante interromper imediatamente o uso e buscar orientação de um profissional de saúde.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.