

**NOME TÉCNICO:** COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE

**NOME COMERCIAL:** COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - GLOMED

**NOTIFICAÇÃO ANVISA:** Produto não passível de regularização junto à GGTPS, de acordo com o enquadramento este produto é definido como não médico, conforme estabelecido pela Resolução RDC 751/2022.

**DETENTOR DO REGISTRO:**

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101 / [sac@olimed.com.br](mailto:sac@olimed.com.br)



**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**

**FLEXPPELL HOSPITALAR LTDA**

RUA JOÃO ZAMARIAN, 515 - DISTRITO INDUSTRIAL II, MOCOCA - SP, 13739-020 BRASIL.

**DESCRIÇÃO TÉCNICA:**

O coletor de material perfurocortante - GLOMED é um dispositivo feito de papelão resistente, projetado para a coleta segura de objetos cortantes, como agulhas e bisturis. Ele possui uma abertura na parte superior para inserção dos materiais, uma tampa que pode ser lacrada e indicadores visuais de preenchimento. Sua base é estável para evitar tombamentos, e vem com instruções de uso para garantir a segurança durante o descarte. Cor amarelo. Não estéril. Produto é livre de látex.

**MODELOS DISPONÍVEIS:**

CÓDIGO INTERNO	MODELO	COR	CAPACIDADE ÚTIL
115300	1,5 LTS	AMARELA	1,05 LTS
115301	3,0 LTS	AMARELA	2,10 LTS
115302	7,0 LTS	AMARELA	5,40 LTS
115303	13 LTS	AMARELA	10,0 LTS
115304	20 LTS	AMARELA	14,0 LTS

**DIMENSÕES DA CAIXA:**

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. EMBALAGEM UNITÁRIA	CÓD. DE BARRAS TRANSPORTE 20 UNIDADES
1,5 LTS	2,600	19,50	24,00	38,30	7898939098495	17898939098492
3,0 LTS	3,530	19,50	24,30	44,70	7898939098501	17898939098508
7,0 LTS	6,580	19,50	38,50	54,00	7898939098518	17898939098515
13 LTS	9,350	19,50	48,80	61,50	7898939098525	17898939098522
20 LTS	12,545	19,50	53,70	72,70	7898939098532	17898939098539

**IMAGEM GRÁFICA:**



**INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:**

É indicado para coletar objetos afiados, como agulhas e bisturis, de forma segura em ambientes médicos e laboratoriais. Ele previne acidentes e contaminação, sendo essencial em hospitais, clínicas e laboratórios, garantindo um ambiente de trabalho seguro.

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em caixa com 01 unidade e caixa de transporte com 20 unidades. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

**VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Segure os materiais cortantes pela parte segura ao inseri-los.
- Feche a tampa do coletor firmemente após o uso.
- Verifique regularmente o nível de preenchimento.
- Limpe e desinfete a área após o descarte.
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida de contaminação;
- Manuseie o coletor com cuidado para evitar perfurações acidentais.
- Certifique-se de fechar a tampa firmemente após o uso para evitar vazamentos ou exposição.
- Não sobrecarregue o coletor, respeitando sua capacidade máxima para evitar transbordamentos.
- Armazene o coletor em locais seguros, fora do alcance de crianças e animais.
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutiliza, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018)
- Atóxico. Livre de Látex

**CONTRAINDICAÇÃO:**

O Coletor para material perfurocortante não deve ser utilizado para o descarte de resíduos que não possuam características perfurocortantes, tais como substâncias líquidas livres, gases, materiais corrosivos, radioativos ou quaisquer outros resíduos incompatíveis com sua finalidade.

Não deve ser utilizado quando apresentar danos estruturais, como rasgos, perfurações, umidade excessiva, deformações ou comprometimento do sistema de fechamento, bem como quando houver preenchimento acima do limite indicado, podendo comprometer a segurança e a eficácia do produto.

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

---

**SIMARA COLOMBI BUSCH**  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138