


NOME TÉCNICO: SONDAS
NOME COMERCIAL: SONDA NASOGASTRICA - GLOMED
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273459013
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: II - MÉDIO RISCO

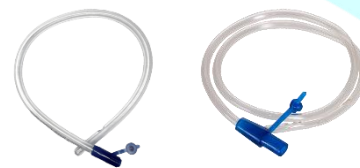

DETENTOR DO REGISTRO:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
CHANGSHU SUPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
Building 2, No.1 Taikang Road, industrial Park, North Region of Zhitang Town, Changshu City, 215531 Jiangsu, P.R. China

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A SONDA NASOGASTRICA – GLOMED é confeccionado em PVC (Cloreto de Polivinila) atóxico, transparente de paredes finas e flexíveis nas opções Curta de 40 a 50 cm de comprimento e Longa de 100 a 120 cm de comprimento, com ponta arredonda e fechada, podendo apresentar 1 ou 2 orifícios laterais. Na outra extremidade do tubo apresenta um conector padrão com ou sem tampa. O produto é livre de látex.

MODELOS E VARIAÇÕES DISPONÍVEIS:

GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA

CÓDIGO INTERNO	MODELO	TAMANHO	COR	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
115497	GLSN-C04	4FR	CINZA	0.80	1.67 ± 0.10	40 A 50 CM
115498	GLSN-C06	6FR	VERDE CLARO	1.05	2.00 ± 0.10	40 A 50 CM
115499	GLSN-C08	8FR	AZUL	1.50	2.70 ± 0.10	40 A 50 CM
115500	GLSN-C10	10FR	PRETO	2.00	3.33 ± 0.10	40 A 50 CM
115501	GLSN-C12	12FR	BRANCO	2.45	4.00 ± 0.15	40 A 50 CM
115502	GLSN-C14	14FR	VERDE	2.95	4.70 ± 0.20	40 A 50 CM
115503	GLSN-C16	16FR	LARANJA	3.40	5.30 ± 0.20	40 A 50 CM
115504	GLSN-C18	18FR	VERMELHO	3.90	6.00 ± 0.20	40 A 50 CM
115505	GLSN-C20	20FR	AMARELO	4.30	6.67 ± 0.20	40 A 50 CM
115506	GLSN-C22	22FR	ROXO	4.50	7.33 ± 0.20	40 A 50 CM
115507	GLSN-C24	24FR	AZUL ESCURO	5.00	8.00 ± 0.20	40 A 50 CM

GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA

CÓDIGO INTERNO	MODELO	TAMANHO	COR	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
115508	GLSN-L04	4FR	CINZA	0.80	1.67 ± 0.10	100 A 120 CM
115509	GLSN-L06	6FR	VERDE CLARO	1.05	2.00 ± 0.10	100 A 120 CM
115510	GLSN-L08	8FR	AZUL	1.50	2.70 ± 0.10	100 A 120 CM
115511	GLSN-L10	10FR	PRETO	2.00	3.33 ± 0.10	100 A 120 CM
115512	GLSN-L12	12FR	BRANCO	2.45	4.00 ± 0.15	100 A 120 CM
115513	GLSN-L14	14FR	VERDE	2.95	4.70 ± 0.20	100 A 120 CM
115514	GLSN-L16	16FR	LARANJA	3.40	5.30 ± 0.20	100 A 120 CM
115515	GLSN-L18	18FR	VERMELHO	3.90	6.00 ± 0.20	100 A 120 CM
115516	GLSN-L20	20FR	AMARELO	4.30	6.67 ± 0.20	100 A 120 CM
115517	GLSN-L22	22FR	ROXO	4.50	7.33 ± 0.20	100 A 120 CM
115518	GLSN-L24	24FR	AZUL ESCURO	5.00	8.00 ± 0.20	100 A 120 CM

DIMENSÕES DA CAIXA

GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA



PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD BARRAS EMBALAGEM UN	COD BARRAS CX COMERCIAL	COD BARRAS TRANSPORTE	
GLSN-C04	3,80	0,32	0,38	0,56	0618341484085	X	20618341484089	800 UND
GLSN-C06	4,10	0,32	0,38	0,56	0618341484092	X	20618341484096	800 UND
GLSN-C08	4,60	0,32	0,38	0,56	0618341484108	X	20618341484102	800 UND
GLSN-C10	5,20	0,32	0,38	0,56	0618341484115	X	20618341484119	800 UND
GLSN-C12	4,60	0,32	0,38	0,56	0618341484122	X	20618341484126	600 UND
GLSN-C14	5,20	0,32	0,38	0,56	0618341484139	X	20618341484133	600 UND
GLSN-C16	5,90	0,32	0,38	0,56	0618341484146	X	20618341484140	600 UND
GLSN-C18	4,90	0,32	0,38	0,56	0618341484153	X	20618341484157	400 UND
GLSN-C20	6,10	0,32	0,38	0,56	0618341484160	X	20618341484164	400 UND
GLSN-C22	6,60	0,32	0,38	0,56	0618341484177	X	20618341484171	400 UND
GLSN-C24	7,50	0,32	0,38	0,56	0618341484184	X	20618341484188	400 UND

GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD BARRAS EMBALAGEM UN	COD BARRAS CX COMERCIAL	COD BARRAS CX EMBARQUE	
GLSN-L04	4,60	0,33	0,38	0,56	0618341484306	X	20618341484300	600 UND
GLSN-L06	5,00	0,33	0,38	0,56	0618341484313	X	20618341484317	600 UND
GLSN-L08	6,10	0,33	0,38	0,56	0618341484320	X	20618341484324	600 UND
GLSN-L10	7,30	0,33	0,38	0,56	0618341484337	X	20618341484331	400 UND
GLSN-L12	6,10	0,33	0,38	0,56	0618341484344	X	20618341484348	400 UND
GLSN-L14	7,10	0,33	0,38	0,56	0618341484351	X	20618341484355	400 UND
GLSN-L16	8,30	0,33	0,38	0,56	0618341484368	X	20618341484362	400 UND
GLSN-L18	7,60	0,33	0,38	0,56	0618341484375	X	20618341484379	300 UND
GLSN-L20	9,40	0,33	0,38	0,56	0618341484382	X	20618341484386	300 UND
GLSN-L22	6,90	0,33	0,38	0,56	0618341484399	X	20618341484393	200 UND
GLSN-L24	8,00	0,33	0,38	0,56	0618341484405	X	20618341484409	200 UND

IMAGEM GRÁFICA:

GLSN-C - SONDA NASOGASTRICA CURTA

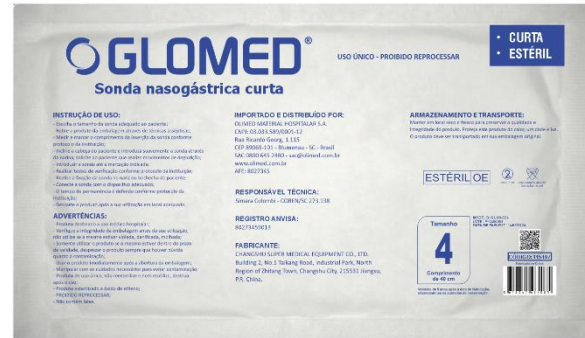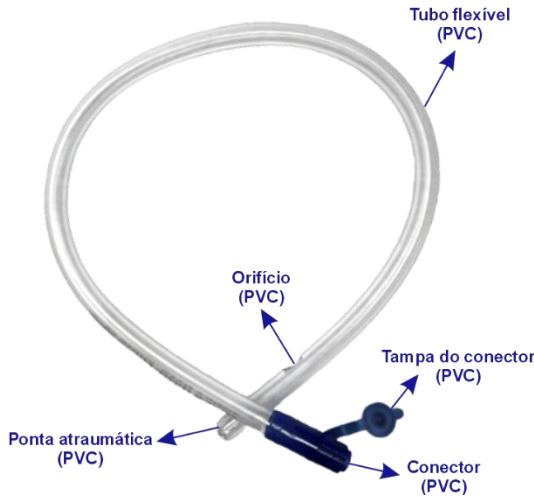

GLSN-L - SONDA NASOGASTRICA LONGA



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para administrar alimentos, medicamentos ou drenar conteúdo gástrico (estômago), é um dispositivo introduzido no estômago através do nariz ou da boca do paciente. Destina-se a utilização a pacientes incapazes de ingerir alimentos através da mastigação e deglutição normais.

EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme plástico transparente e/ou embalagem plástica, com abertura asséptica e rotulagem conforme RDC 751/2022. Cada embalagem contém 1 dispositivo e 1 instrução de uso. As embalagens individuais são acondicionadas em caixa de transporte com 200 a 800 unidades, conforme configuração.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade da embalagem e validade do produto;
- Escolha o tamanho da sonda adequado ao paciente;
- Retire o produto da embalagem através de técnicas assépticas;
- Medir e marcar o comprimento da inserção da sonda conforme protocolo da instituição;
- Incline a cabeça do paciente e introduza suavemente a sonda através da narina, solicite ao paciente que realize movimentos de deglutição;
- Introduzir a sonda até a marcação indicada;
- Realizar testes de verificação conforme protocolo da instituição;
- Realize a fixação da sonda no nariz ou bochecha do paciente;
- Conecte a sonda com o dispositivo adequado;
- O tempo de permanência é definido conforme protocolo da instituição;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

A sonda nasogástrica deve ser evitada em pacientes com obstrução nasal grave, histórico de sangramentos nasais recorrentes, fraturas de base de crânio ou lesões nasais, e em casos de dificuldades respiratórias graves. A inserção e manutenção da sonda devem ser realizadas por profissionais de saúde qualificados para garantir a segurança do paciente

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138